


CARDIOVERSION ÉLECTRIQUE ÉLECTIVE

Acte médical, cependant l'infirmière peut délivrer le choc en présence du médecin ([Tech. 1.2](#))

1. Brancher les électrodes multifonctions au câble et les installer en position antéro-postérieure ou, si impossible, en position antéro-latérale
 2. Appuyer sur **MARCHE**
 3. Appuyer sur **SYNC** – La présence des marqueurs triangulaires sur les QRS confirme le mode synchrone
 4. Appuyer sur **SELECT ENERG** pour sélectionner le niveau d'énergie prescrit
 5. Appuyer sur **CHARGER** et attendre le chargement complet
- Alerte clinique :** Au moment de la décharge, personne ne doit toucher au lit, ni au patient et la source d'oxygène doit être retirée
6. Maintenir le bouton **CHOC** enfoncé jusqu'à ce que le choc soit administré
 - Pour annuler une charge : appuyer sur le sélecteur situé dans la partie inférieure droite de l'appareil



Interface Lifepak 15

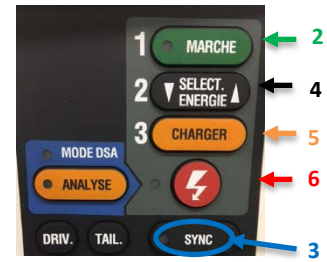


Interface Lifepak 20e

CARDIOSTIMULATION TRANSCUTANÉE

Acte médical, cependant l'infirmière peut ajuster les paramètres en présence du médecin ([Tech. 1.3](#))

1. Brancher les électrodes multifonctions au câble et les installer en position antéro-postérieure
2. Installer les 3 électrodes ECG sur le thorax du patient
3. Appuyer sur **MARCHE**
4. Appuyer sur **STIMUL** – S'assurer que la lumière s'allume sur le bouton
5. Analyser le rythme du patient. S'assurer que les marqueurs triangulaires apparaissent sur chaque QRS
6. Appuyer sur **FREQ** afin d'obtenir la fréquence cardiaque prescrite
7. Appuyer sur **COURANT** pour augmenter le courant jusqu'à ce que chaque spicule conduise à un complexe QRS ; nécessite en moyenne 50 mA
8. Augmenter le courant de 5 à 10 mA supplémentaires
9. Vérifier le pouls fémoral pour confirmer l'efficacité de la cardiostimulation
10. S'assurer que l'indicateur **STIMUL** clignote à chaque spicule sur le tracé
 - Pour visualiser le rythme autonome du patient : Appuyer sur PAUSE et maintenir le bouton enfoncé
 - Pour arrêter la stimulation cardiaque : Réduire le courant à zéro ou appuyer sur STIMUL

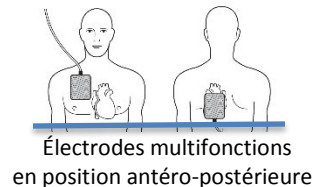

Interface Lifepak 15 et 20e

Nécessite une ordonnance médicale

Durée d'utilisation des électrodes multifonctions :

Administration de 50 chocs ou 8 heures en cardiostimulation transcutanée active