

1.4.3 – AIDE-MÉMOIRE – UTILISATION DU CARDIOSTIMULATEUR EXTERNE TEMPORAIRE


Préparation du cardiostimulateur externe temporaire (CSET)

1. Vérifier l'intégrité du boîtier du CSET et du câble
2. Mettre des piles neuves à chaque installation
 - Appuyer sur le bouton d'ouverture du compartiment des piles
 - Mettre 2 piles AA en respectant le marquage à l'intérieur du compartiment
 - Fermer le compartiment des piles



Pour un changement de piles lorsque le CSET est en fonction : vous avez 30 secondes pour effectuer le changement sans compromettre le fonctionnement de l'appareil

3. Installer le ou les câbles
 - Si CSET simple chambre ventriculaire : brancher le câble dans le connecteur « V » (blanc)
 - Si CSET double chambre (auriculaire et ventriculaire) : brancher le câble à l'oreillette dans le connecteur « A » (bleu) et celui au ventricule dans le connecteur « V » (blanc)

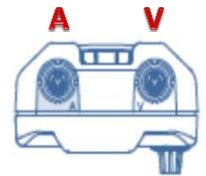


Ouverture du cardiostimulateur externe temporaire (CSET)

1. Appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT
2. Sélectionner, à l'aide des flèches, le mode de stimulation désiré (VVI, DDD)
3. Ajuster les paramètres selon la prescription médicale

Écran du haut { Fréquence cardiaque : tourner le sélecteur
[Programmation par défaut : 80 / min]
Courant de sortie (output) : tourner le sélecteur
[Programmation par défaut : 10 mA]

Écran du bas { Sensibilité :
- À l'aide des flèches, sélectionner le paramètre de sensibilité
- Ajuster le niveau de sensibilité avec le sélecteur au bas de l'appareil
[Programmation par défaut : 2 mV]

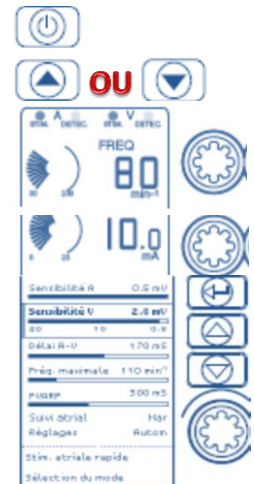

▲ ALLERTE NURSING

- Réduire les valeurs du courant de sortie (output) à l'amplitude minimale avant de connecter le CSET au système de sondes du patient. Ajuster les seuils de détection (sensibilité) avant de remonter les valeurs du courant de sortie (output) au niveau prescrit.
- **OUVERTURE DU CSET EN SITUATION D'URGENCE : APPUYER SUR LA TOUCHE ROUGE**




Fermeture du cardiostimulateur externe temporaire (CSET)

1. Au besoin, déverrouiller l'appareil en appuyant sur la touche de VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE
2. Appuyer sur la touche MARCHÉ/ARRÊT
3. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer l'arrêt de l'appareil



Commandes et voyants du cardiostimulateur externe (CSET)

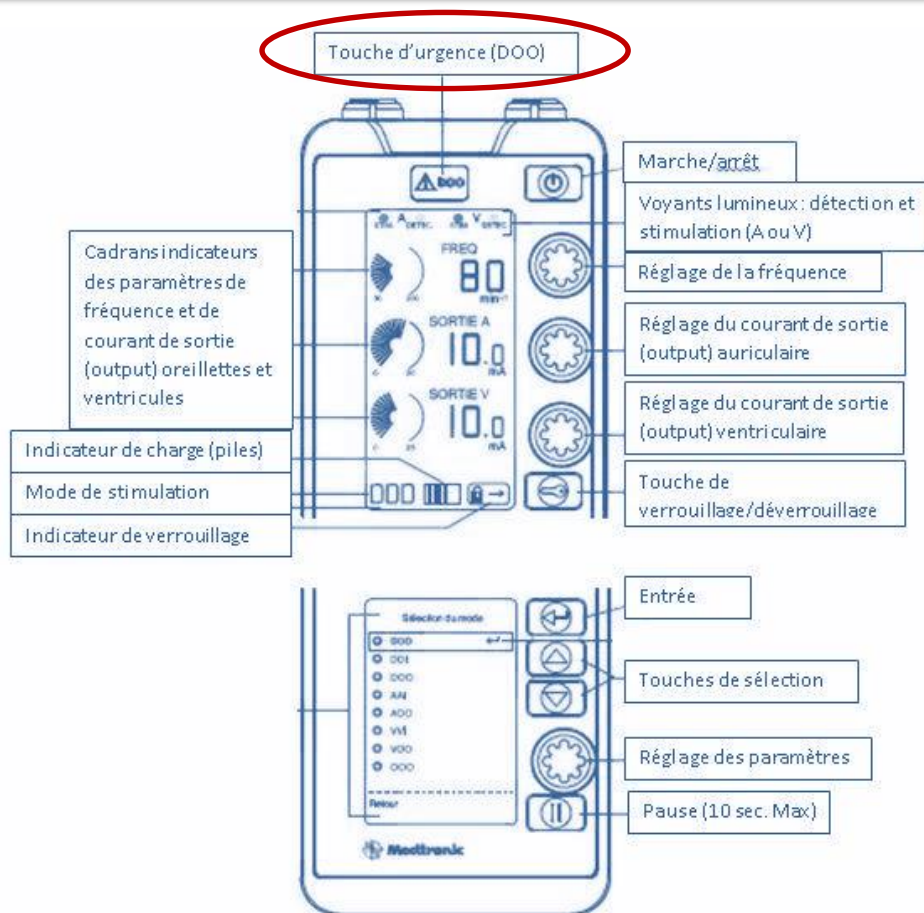

Medtronic (2013), fig. 1-2, p.23-24

Élaboré par J. Allard, en collaboration avec A. Brisebois, octobre 2014

Révisé par A.Brisebois, juin 2016

Figures : Medtronic (2013), Manuel technique – Stimulateur externe temporaire double chambre