

Nom du document : Procédure abrégée d'utilisation du lecteur de cétonémie StatStrip

Identifiant :
38-EBMD-DOC-281735
Version : 1

Autorité responsable : Jonathan Michaud-Lévesque, Ph.D., DEPD, CSPQ, Biochimiste clinique

Date d'entrée en vigueur :
2024-07-17

Ce document fait référence à la procédure 38-EBMD-PON-281689 *Utilisation du lecteur de cétonémie StatStrip*

TEST PATIENT

Stat Strip

Valeurs de référence : <0,3 mmo/L




1- Appuyer sur **Début**.




2- Scanner votre numéro d'employé puis appuyer sur **Accepter**.



3- Dans le menu Test patient, cliquer sur **Accepter**.

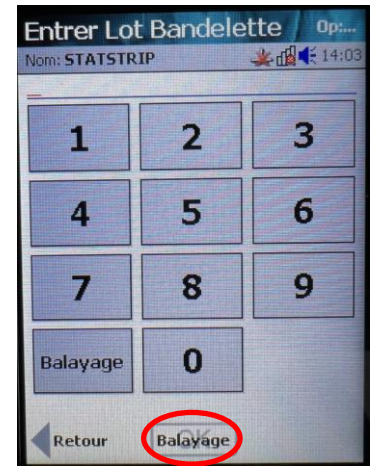

4- Scanner le numéro du lot de bandelette.

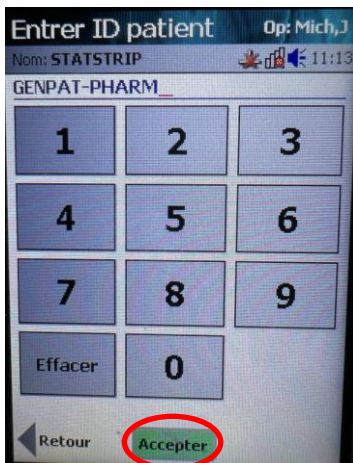

5- Scanner le code-barres sur le bracelet du patient ou tout autre support correspondant à son numéro de dossier, puis cliquer sur **Accepter**.



6- Insérer l'extrémité dorée de la bandelette puis déposer la goutte de sang en une seule étape, tel que demandé par l'appareil.




7- Le résultat s'affiche en 10 secondes. Accepter ou rejeter le résultat.


CONTRÔLE QUALITÉ – Fréquence : chaque jour



1- Appuyer sur **Début**.

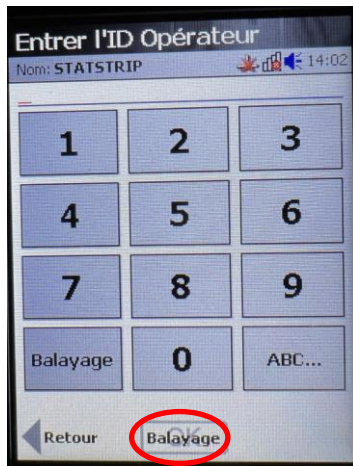


2- **Scanner** votre carte d'employé.

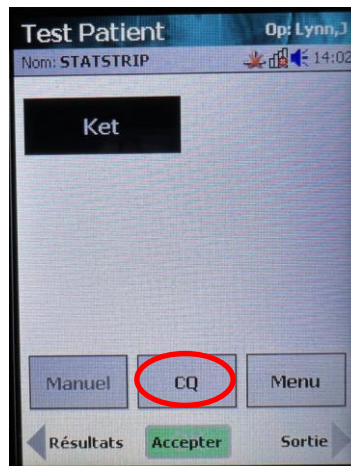

3- Dans le menu Test patient, cliquer sur **CQ**.




4- **Scanner** le numéro du lot de bandelette.

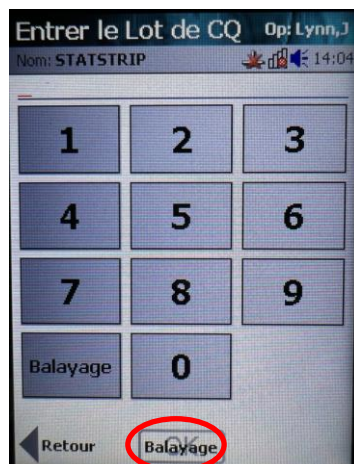

5- **Scanner** le code-barres sur la bouteille du contrôle niveau 1 ou 3.



6- Insérer l'extrémité dorée de la bandelette puis déposer la goutte de contrôle en une seule étape, tel que demandé par l'appareil.

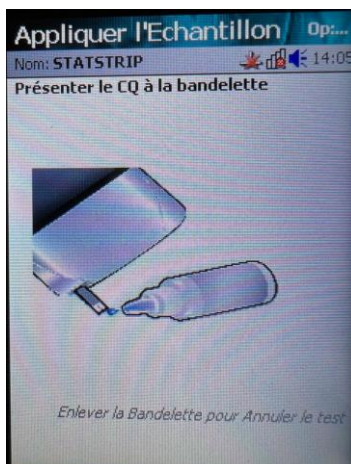

7- Le résultat s'affiche en 10 sec. **Accepter** le résultat. En cas d'erreur, laisser un commentaire (**Remarque**).

- **Jeter les solutions de contrôle et les bandelettes 3 mois après ouverture.**
- **En cas de résultat patient douteux ou d'échec du contrôle qualité, refaire un contrôle qualité.**

Pour tout problème, contacter le laboratoire par courriel (EBMD.icm@icm-mhi.org) ou par téléphone au (514) 376-3330 poste 3871.

LOCALISATION DES COPIES PAPIER : Cartable Lecteur de cétones – EBMD (Médecine nucléaire)

RÉFÉRENCE : 38-EBMD-DOC-291843 Manuel d'utilisation StatStrip GluKETde Nova Biomedical v1.86