

# Pompe Kangaroo OMNI<sup>MD</sup>

## 1. Poignée

## 2. Indicateurs d'état de la pompe

- Vert fixe = Pompe en marche
- Vert clignotant = Prêt à pomper
- Jaune fixe = information (alarme de faible priorité)
- Jaune clignotant = attention (alarme de priorité moyenne)
- Rouge clignotant = alerte critique (alarme de priorité haute)

## 3. Bouton mode nuit

## 4. Actionneur de valve

## 5. Boutons de sélection

## 6. Bouton d'alimentation électrique

## 7. Voyant d'alimentation électrique


## 8. Capteur d'occlusion

## 9. Rotor de pompe


## 10. Support de capuchon ENFit<sup>TM</sup>




**Clair**  
Alimentation  
uniquement

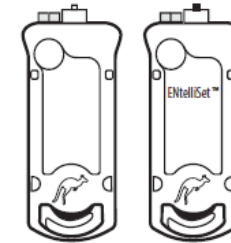
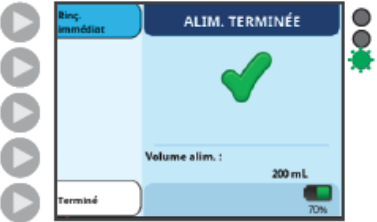





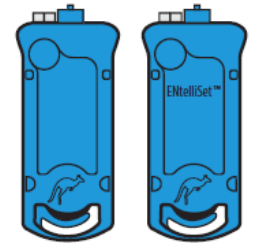

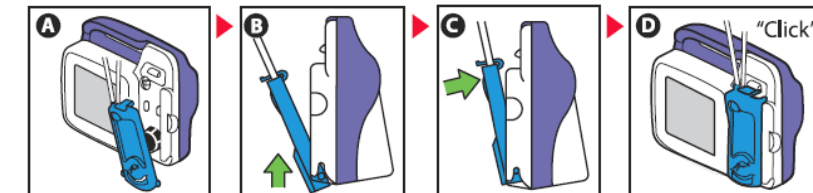



**Bleu**  
Nourrir et rincer  
(hydrater)




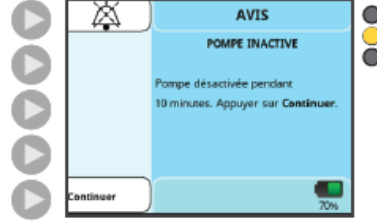


La séquence de chargement appropriée des kits d'alimentation Kangaroo OMNI<sup>TM</sup> s'affiche à l'écran de la pompe comme suit :

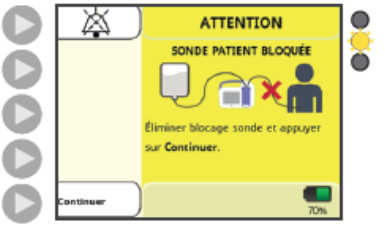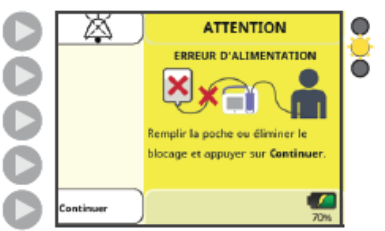

Alarme/notification	Définition	Solution
 <b>Alarmes vert clignotant</b>		
	<p><b>Alimentation terminée</b></p> <p>Une alimentation réussie est terminée.</p>	<p>Presser <b>Fait</b>.</p>
	<p><b>Alimentation incomplète</b></p> <p>Une alimentation est interrompue avant que la totalité de la quantité nutritive n'ait été délivrée.</p>	<p>Appuyez sur <b>Continuer Alimentation</b> pour reprendre l'alimentation en cours.</p> <p>Pour commencer une nouvelle alimentation, appuyer sur <b>Redémarrer alimentation</b></p>
 <b>Alarmes jaunes fixes</b>		
	<p><b>Pompe inactive</b></p> <p>La pompe n'a pas fonctionné activement depuis plus de 10 minutes.</p>	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b>.</p>
	<p><b>Batterie faible</b></p> <p>Il reste 30 minutes d'autonomie de la batterie.</p>	<p>Branchez la pompe sur une alimentation électrique.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsqu'il reste 10 minutes d'autonomie, cet écran d'alarme devient jaune.</p>

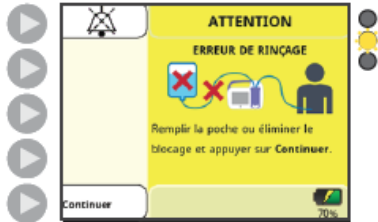Alarme/notification	Définition	Solution	
 <b>Alarmes jaunes clignotantes</b>			
	<p><b>Rotor coincé</b></p> <p>Il y a une résistance excessive sur le rotor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que la pompe est débranchée.</li> <li>2. Nettoyez le rotor avec un chiffon humide.</li> <li>3. Rechargez la cassette.</li> </ol>	
	<p><b>Cassette hors logement</b></p> <p>La cassette n'est pas correctement chargée dans la pompe.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechargez la cassette.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Continuer</b>.</li> </ol>	
	<p><b>Tubulure du patient bouchée</b></p> <p>Il y a un bouchon dans la tubulure entre la pompe et le patient.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspectez le tuyau entre la pompe et le patient pour localiser le colmatage.</li> <li>2. Si possible, éliminez le colmatage.</li> <li>3. Redémarrez l'alimentation.</li> </ol>	
	<p><b>Erreur d'alimentation</b></p> <p>La poche d'alimentation est vide ou il y a un bouchon ou un pli dans la tubulure entre la poche d'alimentation et la pompe.</p>	<p>Vérifiez si la poche d'alimentation <b>est vide</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplissez la poche.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Continuer</b>.</li> <li>3. Assurez-vous qu'AUCUN patient n'est connecté à la pompe d'alimentation.</li> <li>4. Amorcez la pompe pour l'alimentation suivante.</li> </ol>	<p>Si la poche d'alimentation <b>contient des fluides entéraux</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez la tubulure entre la poche d'alimentation et la pompe pour localiser l'obstruction et éliminez-la, si possible.</li> <li>2. Redémarrer l'alimentation/le rinçage.</li> </ol>

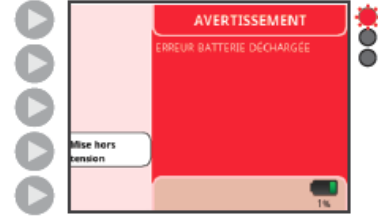Alarme/notification	Définition	Solution	
	<p><b>Erreur de rinçage</b></p> <p>La poche de rinçage est vide ou il y a un bouchon ou un pli dans le tube entre la poche de rinçage et la pompe.</p>	<p>Si la poche de rinçage <b>est vide</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplissez la poche.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Continuer</b>.</li> <li>3. Assurez-vous qu'AUCUN patient n'est connecté à la pompe d'alimentation.</li> <li>4. Amorcez la pompe pour le rinçage suivant.</li> </ol> <p>Si le poche de rinçage <b>contient du liquide</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez la tubulure entre la poche de rinçage et la pompe pour localiser l'obstruction et éliminez-la, si possible.</li> <li>2. Redémarrer l'alimentation/le rinçage.</li> </ol>	
<p> <b>Alarmes rouges clignotantes</b></p>			
	<p><b>Erreur système</b></p> <p>Une erreur générale.</p>	<p>Appuyez sur <b>Redémarrer Pompe</b>.</p>	
	<p><b>Batterie déchargée</b></p> <p>La batterie est morte.</p>	<p>Branchez la pompe sur une alimentation électrique et redémarrez-la.</p>	