



## AU PERSONNEL CONCERNÉ

### COMMENT INSTALLER L'ATTELLE

#### Installation d'une attelle pour membre supérieur d'un patient hémiplégique

#### Pour qui ?

- Patient avec paralysie ou parésie de l'épaule suite à un AVC.

#### Pourquoi ?

- Éviter la subluxation de l'épaule.
- Éviter une blessure de l'épaule lors des changements de position du patient.  
Ex. : transfert du lit au fauteuil.



1. Placer le support le plus petit sous le coude.
2. Passer la bandoulière sous le bras puis la ramener vers l'avant par-dessus l'épaule opposée.
3. L'autre support (plus gros) va sous la main.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous  
au poste 3441.