

Nom du formulaire : Évaluation des compétences – i-STAT Alinity pour les dosages d'ACT (sans CIQ)	Identifiant : 38-EBMD-FOR-199265 Version : 2.2
Autorité responsable : Jonathan Michaud-Levesque, Biochimiste clinique	Date d'entrée en vigueur : 2025-04-01

Ce formulaire est en lien avec la procédure : 38-EBMD-PON-193560 Utilisation de l'appareil i-STAT Alinity d'Abbott pour la mesure de l'ACT

Nom, Prénom : _____ Numéro d'employé _____

Service : _____ Date : 202__ - ____ - ____ Note de passage : 6/7

Questions 1, 2 et 3 à choix multiples (1 point par question) Note obtenue : /7

1. Quel est le dispositif de prélèvement acceptable pour un échantillon ACT ?

- a. Tube vert (héparine de lithium/sodium)
- b. Seringue en plastique ordinaire
- c. Tube capillaire hépariné

2. Si un échantillon est prélevé sans anticoagulant, il doit être testé:

- a. Dans les 5 minutes
- b. Immédiatement
- c. Dans les 2 minutes
- d. Dans les 10 minutes

3. La numérisation doit être utilisée pour :

- a. L'identification de l'opérateur
- b. L'identification du patient
- c. L'identification du numéro de lot de la cartouche et des fioles de contrôle de qualité
- d. a et c
- e. a, b et c

Question 4, Compléter les phrases (1 point chacune)

4. Les boîtes de cartouches doivent être conservées au réfrigérateur.

- a. Si une boîte est sortie du réfrigérateur le 28 janvier 2022, quelle date inscririez-vous sur le côté de la boîte? _____
- b. Si vous prenez une seule cartouche dans une boîte au réfrigérateur, combien de temps devez-vous attendre avant de l'utiliser pour faire un contrôle ou un dosage de patient?

Ce n'est pas terminé, voir au verso...

Questions à réponse courte (1 point par question)

5. Un résultat patient affiche « ** ». Que faites-vous?

6. Comment savez-vous qu'une cartouche seule à température ambiante peut être utilisée?

Vu par	Employé en formation	Formateur	Responsable EBMD
Initiales			
Date	202__-__-__	202__-__-__	202__-__-__

LOCALISATION DES COPIES PAPIER : Dans le bureau du responsable technique EBMD ICM

RÉFÉRENCE : S.O.