
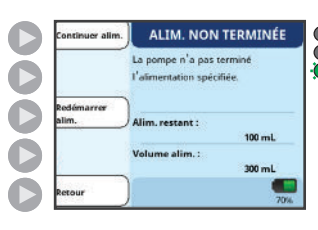
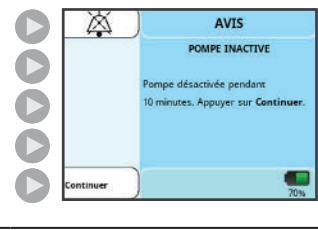

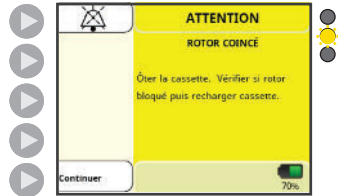
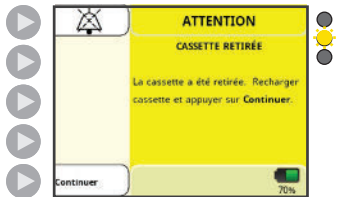
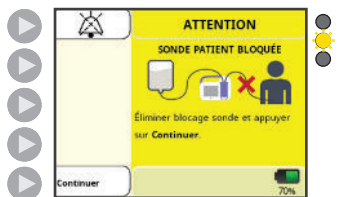
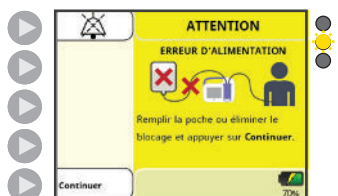


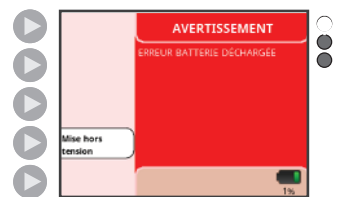


Guide de référence rapide de dépannage

- Vert fixe = Pompe en marche
- Vert clignotant = Prêt à pomper
- Jaune fixe = information (alarme de faible priorité)
- Jaune clignotant = attention (alarme de priorité moyenne)
- Rouge clignotant = alerte critique (alarme de priorité haute)



Alarmes vert clignotant		
	<p>Alimentation terminée</p> <p>Une alimentation réussie est terminée.</p>	<p>Presser Fait.</p>
	<p>Alimentation incomplète</p> <p>Une alimentation est interrompue avant que la totalité de la quantité nutritive n'ait été délivrée.</p>	<p>Appuyez sur Continuer Alimentation pour reprendre l'alimentation en cours.</p> <p>Pour commencer une nouvelle alimentation, appuyer sur Redémarrer alimentation</p>
Alarmes jaunes fixes		
	<p>Pompe inactive</p> <p>La pompe n'a pas fonctionné activement depuis plus de 10 minutes.</p>	<p>Appuyez sur Continuer.</p>
	<p>Batterie faible</p> <p>Il reste 30 minutes d'autonomie de la batterie.</p>	<p>Branchez la pompe sur une alimentation électrique.</p> <p>Remarque : Lorsqu'il reste 10 minutes d'autonomie, cet écran d'alarme devient jaune.</p>

☀️ Alarmes jaunes clignotantes			
	Rotor coincé Il y a une résistance excessive sur le rotor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que la pompe est débranchée. 2. Nettoyez le rotor avec un chiffon humide. 3. Rechargez la cassette. 	
	Cassette hors logement La cassette n'est pas correctement chargée dans la pompe.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechargez la cassette. 2. Appuyez sur Continuer. 	
	Tubulure du patient bouchée Il y a un bouchon dans la tubulure entre la pompe et le patient.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspectez le tuyau entre la pompe et le patient pour localiser le colmatage. 2. Si possible, éliminez le colmatage. 3. Redémarrez l'alimentation. 	
	Erreur d'alimentation La poche d'alimentation est vide ou il y a un bouchon ou un pli dans la tubulure entre la poche d'alimentation et la pompe.	Vérifiez si la poche d'alimentation est vide : <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplissez la poche. 2. Appuyez sur Continuer. 3. Assurez-vous qu'AUCUN patient n'est connecté à la pompe d'alimentation. 4. Amorcez la pompe pour l'alimentation suivante. 	Si la poche d'alimentation contient des fluides entéraux : <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la tubulure entre la poche d'alimentation et la pompe pour localiser l'obstruction et éliminez-la, si possible. 2. Redémarrer l'alimentation/le rinçage.
	Erreur de rinçage La poche de rinçage est vide ou il y a un bouchon ou un pli dans le tube entre la poche de rinçage et la pompe.	Si la poche de rinçage est vide : <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplissez la poche. 2. Appuyez sur Continuer. 3. Assurez-vous qu'AUCUN patient n'est connecté à la pompe d'alimentation. 4. Amorcez la pompe pour le rinçage suivant. 	Si le poche de rinçage contient du liquide : <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la tubulure entre la poche de rinçage et la pompe pour localiser l'obstruction et éliminez-la, si possible. 2. Redémarrer l'alimentation/le rinçage.
☠️ Alarmes rouges clignotantes			
	Erreur système Une erreur générale.	Appuyez sur Redémarrer Pompe .	
	Batterie déchargée La batterie est morte.	Branchez la pompe sur une alimentation électrique et redémarrez-la.	

Pour plus d'informations,

référez-vous à votre mode d'emploi pour avoir la liste complète des notifications, alarmes et instructions de résolution. Une copie du mode d'emploi se trouve sur la clé USB fournie avec chaque pompe d'alimentation entérale Kangaroo OMNI™, ou en ligne sur mykangaroolearning.com. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, veuillez consulter votre représentant commercial Cardinal Health ou appeler le service à la clientèle.

