


INSTALLATION DU SYSTÈME DE DRAINAGE THORACIQUE

PLEUR-EVAC Sahara^{MD}

(Se référer à la technique de soins sur le drain thoracique)

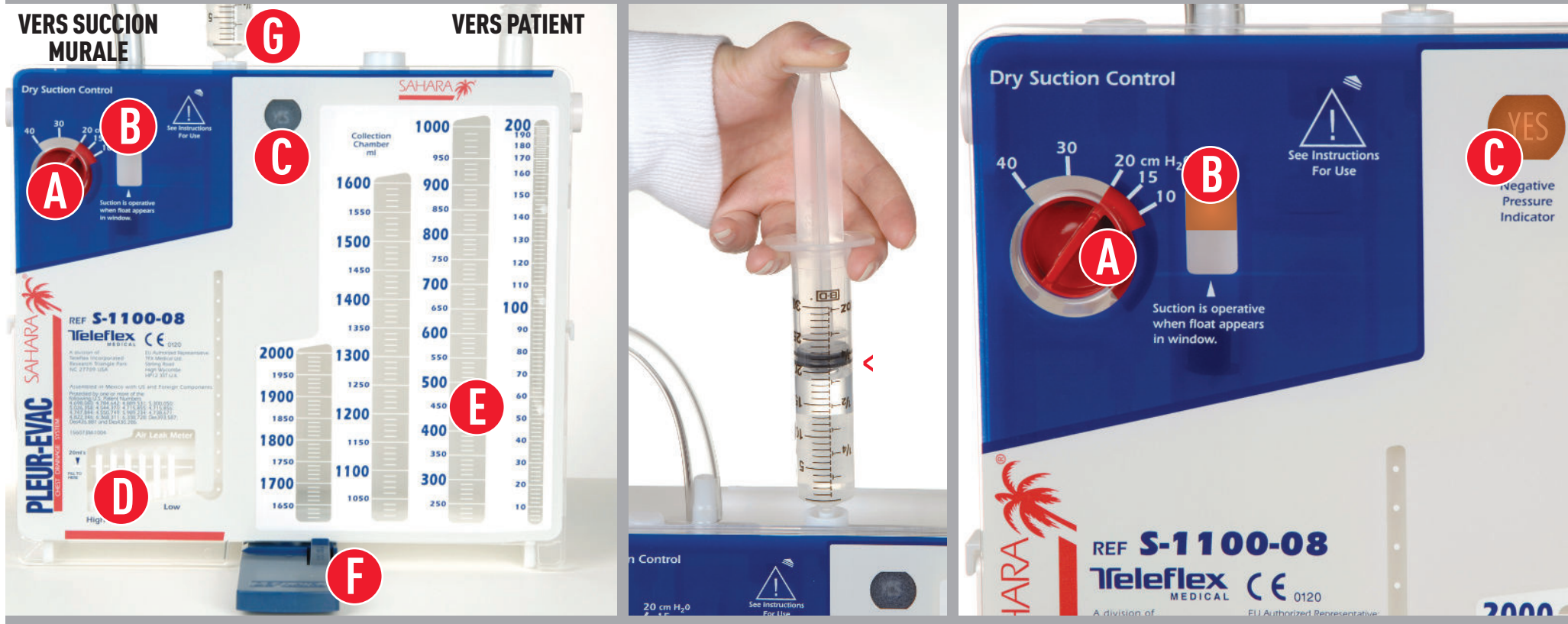

DESCRIPTION DU SYSTÈME DE DRAINAGE

- A** Sélecteur du niveau d'aspiration (en mmHg)
- B** **FLOTTEUR ORANGE** : Indicateur de fonctionnement de l'aspiration
- C** Indicateur de pression négative (YES)
- D** Indicateur de fuite d'air
- E** Chambre de recueil du liquide drainé (2000 mL)
- F** Support de stabilisation
- G** Site d'injection sans aiguille

MONTAGE DU DRAIN

- Ouvrir l'emballage du système
- Utiliser le support pour stabiliser le drain sur le plancher
- Injecter 20 mL d'eau stérile (seringue pré-remplie) dans le site (G)
L'eau de couleur bleue doit atteindre les pointillés de l'indicateur de fuite d'air
- Brancher le drain, à l'aide d'une rallonge, au site de succion murale, et ouvrir la pression au maximum.

SI SOUS SUCCION


- A** Ajuster le sélecteur d'aspiration selon le niveau de succion prescrit
- B** Le flotteur orange doit être visible et maintenu vers le haut
- C** L'indicateur de la pression négative (YES) doit être visible

MATÉRIEL POUR L'INSTALLATION DU DRAIN

- Système *Pleur-Evac Sahara^{MD}*
- Plateau stérile pour installation de drain
 - Champ stérile fenestré
 - Blouse stérile (pour le médecin)
 - Bistouri
 - Seringue 10 mL
 - Aiguille 22G 1 1/2 po et 20G 1 po
 - Soie 2,0 avec aiguille droite
 - Compresse stériles 10 cm x 10 cm
- Drain (calibre selon médecin)
- Masque, chapeau et gants stériles (pour le médecin)
- Solution de Chlorhexidine 2 % et d'alcool 70 % teintée rose
- 1 fiole 20 mL de Xylocaine 2 %
- Bande de fixation adhésive souple
- Protecteur cutané (Cavilon^{MC})
- Attaches à drains « tie-wrap »
- Diachylon 1 po en tissu
- Connecteur droit pour drain
- Rallongé(s) pour succion
- Ciseaux stériles

PANSEMENT

- Mettre des compresses stériles sous et sur le site d'insertion du drain
- Appliquer le protecteur cutané à l'endroit où sera collé la bande de fixation adhésive
- Recouvrir les compresses avec la bande de fixation adhésive
- Fixer le drain à la peau avec la bande de fixation adhésive
- Solidifier le connecteur et le drain avec les attaches à drain, puis les recouvrir de diachylon

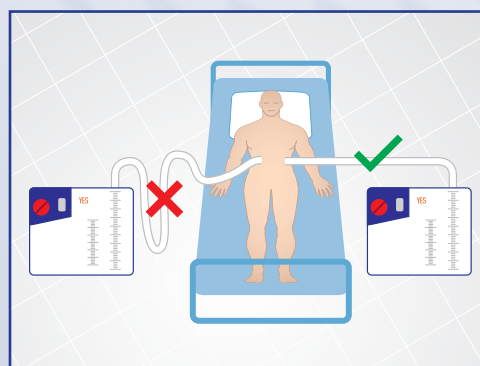

PRÉ INSTALLATION

- Prendre signes vitaux
- Installer O₂ par lunette nasale PRN ou Ventimask PRN
- Administrer analgésique PRN selon ordonnance
- Positionner le patient selon la demande du médecin
- Assister le médecin pour la procédure

POST INSTALLATION

- Maintenir EN TOUT TEMPS le drain sous le niveau d'insertion du drain
- Vérifier si présence de bulles d'air dans l'indicateur de fuite d'air (peut être normale ou anormale selon la condition clinique du patient)
- Clamper le drain SEULEMENT sous ordonnance médicale ou lors du changement de boîtier
- Référer à la technique de soins sur le drain thoracique pour les soins et surveillances
- Éviter de traire la tubulure du drain



**INSTITUT DE
CARDIOLOGIE
DE MONTRÉAL**