

PROCÉDURE

Nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical

Procédure n° : PCI	N° de la politique associée : aucune	
Approuvée par : Prévention et contrôle des infections et Service d'hygiène et Salubrité	Approuvée le :	Révision le : 1 octobre 2025

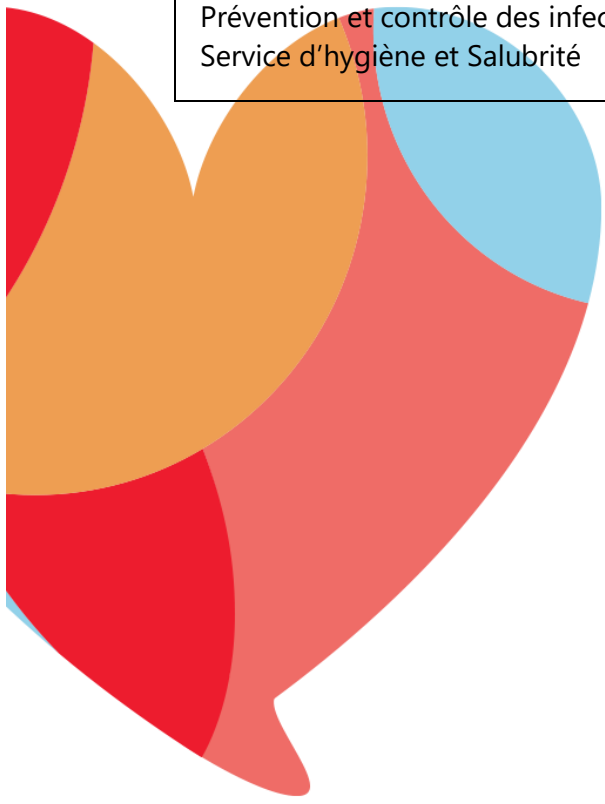


Table des matières

PROCÉDURE	1
1. INTRODUCTION	5
2. OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE	5
3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS	6
4. ÉTAPES	8
LES CINQ GRANDS PRINCIPES EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ	8
PRATIQUES DE BASE EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ	10
Principes généraux.....	10
Préparation des agents chimiques pour le nettoyage et la désinfection.....	11
Utilisation et entreposage des agents chimiques pour le nettoyage et la désinfection	12
Trajectoire appropriée de l'équipement.....	13
Les pratiques de base impliquent ;	13
Tâches et fréquences	13
Vérification et contrôle de la qualité du nettoyage	14
PRODUITS À UTILISER ET NOMBRE D'ÉTAPES SELON LES TYPES DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES	15
FICHES PROCÉDURALES : DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS	17
APPAREIL D'ÉCHOGRAPHIE DES MÉDECINS	18
APPAREIL DE GESTION DE TEMPÉRATURE <i>Arctic Sun</i>	19
APPAREIL DE PHOTODÉSINFECTION NASALE <i>STERIWAVE</i>	20
APPAREIL D'ÉVALUATION DU VOLUME VÉSICAL (BLADDER SCAN).....	21
APPAREIL <i>GlideScope</i>	22
APPAREIL POUR BAS DE COMPRESSIONS INTERMITTENTS.....	23
APPAREIL VOCERA ET SPECTRALINK.....	24
ARRÊT STOP.....	25
BALANCE HYGIE.....	26
BÉQUILLE.....	27
CABARET À PANSEMENT ET CABARET POUR PRÉLÈVEMENT.....	28
CÂBLE ÉLECTRONIQUE (ex : câble pour sonde thermique, pour capteur à pression, pour Swan, etc.)	29
CHAISE D'AISANCE	30
CHARIOT À CODE ET CHARIOT COVID DU 3 ^E CENTRE.....	31
CHARIOT À MÉDICAMENTS.....	32
CHARIOT À INSTRUMENTATION, À PANSEMENTS, D'ISOLEMENT ET DE MATÉRIEL POUR BRONCHOSCOPIE	33
CHARIOT DE FOURNITURES ET ÉTAGÈRES (JUSTE À TEMPS OU CORRIDOR)	34
CHARIOT DE LINGERIE	35
CHARIOT DE SOINS ET CHARIOT DE THORACOTOMIE DU 3 ^E NORD.....	36
CHARIOT DE TRANSPORT À CYLINDRE DE GAZ MÉDICAL	37
CHARIOT D'INSTRUMENTATION DU 3 ^E NORD.....	38
CHARIOT RÉINTUBATION D'INHALOTHÉRAPIE.....	39
CIVIÈRE.....	40
COAGUCHECK, GLUCOMÈTRE, APPAREIL I-STAT.....	41
CYLINDRE À GAZ MÉDICAL ET DÉBITMÈTRE.....	42
DISTRIBUTEUR À MÉDICAMENTS.....	43
DOPPLER MOBILE SUR PIEDS	44

DOPPLER PORTATIF.....	45
DOSSIERS.....	46
ÉLECTROCARDIOGRAPHE MOBILE	47
FAUTEUIL À PRÉLÈVEMENT.....	48
FAUTEUIL D'EXAMEN MÉDICAL	49
FAUTEUIL GÉRIATRIQUE.....	50
FAUTEUIL PATIENT-VISITEUR	51
FAUTEUIL ROULANT (transport/multi-usager).....	52
FAUTEUIL ROULANT (longue durée/usager unique)	53
GLACIÈRE POUR LE TRANSPORT À PRÉLÈVEMENTS	54
GUITARE À CHEVEUX.....	55
HORLOGE MOBILE.....	56
LÈVE-PATIENT MOBILE ÉLECTRIQUE	57
LÈVE-PATIENT SUR RAIL	58
MACHINE À HÉMOFILTRATION (CVVH).....	59
MARCHETTE	60
MONITEUR CARDIAQUE DE TRANSPORT	61
MONITEUR DE DÉBIT CARDIAQUE <i>HemoSphere</i>	62
MONITEUR – DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE <i>Lifepak</i>	63
MONITEUR DE LA FONCTION CÉRÉBRALE <i>INVOS</i> ET <i>BIS</i> de <i>MedTronic</i>	64
MONITEUR DE SIGNES VITAUX SUR BASE MOBILE	65
OPHTALMOSCOPE ET OTOSCOPE MOBILE.....	66
PANIERES	67
PÈSE-PERSONNE À RUBAN	68
PÈSE-PERSONNE PORTATIF	69
PINCE TRUCLIP À SUPPORTS POUR CAPTEURS	70
PLANCHE DE TRANSFERT.....	71
POMPE ACP.....	72
POMPE À GAVAGE	73
POMPES À PERFUSION ET POUSES-SERINGUES <i>B.Braun</i> dans le Space Station (station de chargement)	74
QUADRIPODE	75
REPOSE-PIEDS	76
SATUROMÈTRE OU MONITEUR SPO ₂	77
SPHYGMOMANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE MOBILE	78
SPHYGMOMANOMÈTRE MANUEL MOBILE.....	79
STATION AVEC ORDINATEUR PORTABLE.....	80
STÉTHOSCOPE	81
SUPPORT À DRAIN POUR TIGE À SOLUTÉ.....	82
SUPPORT À POCHE DE LINGERIE	83
TABLE D'EXAMEN.....	84
TABLE DE TRANSPORT.....	85
TABLETTE ÉLECTRONIQUE DANS LE COFFRE ERGOTRON.....	86
TÉLÉMÉTRIE	87
TÉLÉVISEUR-MOBILE	88
THERMOMÈTRE ET BOÎTIER MURAL	89
TIGE À SOLUTÉ	90
TIGE À SOLUTÉ SUSPENDUE.....	91
TOUR À BRONCHOSCOPIE.....	92
UNITÉ DE RÉCHAUFFEMENT PORTATIVE « WARMTOUCH ».....	93
VERTICALISATEUR	94

RÉFÉRENCES	95
5. DISPOSITION FINALE	96
RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE	96
ENTRÉE EN VIGUEUR	96
RÉVISION.....	96
ANNEXE 1	97
ANNEXE 2	98
ANNEXE 3	101

1. INTRODUCTION

Dans le cadre des problématiques reliées aux infections nosocomiales, les lignes directrices en hygiène et salubrité ont suscité de nombreuses réflexions à l'égard de l'environnement et du matériel utilisé. La responsabilité du nettoyage et de la désinfection de plusieurs surfaces telles que les murs, les planchers, le mobilier et l'environnement en général est déjà confiée au service d'hygiène et salubrité.

Si le matériel de soins réutilisables n'est pas désinfecté adéquatement entre chaque usager, le risque de transmission de pathogène à d'autres usagers augmente. La transmission peut alors se faire par contact indirect, soit lors d'un transfert de microorganismes par le biais du matériel de soins contaminé utilisé pour un autre usager.

En se basant sur les recommandations du guide « Lignes directrices en hygiène et salubrité : analyse et concertation », une réflexion a été entamée par la direction des services techniques, la direction des soins infirmiers et les conseillères en prévention des infections, ce qui a permis de fournir une procédure standard de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux.

Les équipements inclus dans ce document concernent les équipements médicaux, les articles électroniques tel que les tablettes, les ordinateurs portables et les téléphones, qui peuvent entrer en contact direct ou indirect avec les patients, et pour lesquels l'attribution de la responsabilité du nettoyage et de la désinfection n'était auparavant pas officiellement déterminée.

Une désinfection de bas niveau désigne une désinfection de la surface par contact d'un produit désinfectant qui élimine la plupart des bactéries, champignons et virus. Elle convient pour le matériel de soins réutilisable ayant un faible risque de transmission d'infection (équipement médical non critique).

L'entretien adéquat de l'environnement axé sur de meilleures pratiques de prévention est une responsabilité partagée entre le service d'hygiène-salubrité et les autres services et utilisateurs.

La collaboration entre les différentes parties concernées est un facteur de réussite dans la prévention et le contrôle des infections.

2. OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE

1. Réduire au minimum la contamination croisée et prévenir la propagation des infections nosocomiales.
2. Assurer une uniformité dans l'exécution et la qualité des tâches de nettoyage et de désinfection.
3. Assurer un environnement propre.
4. Assurer la sécurité des usagers et du personnel.

3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Cette procédure s'applique à tous les travailleurs de la santé qui **utilisent** les équipements médicaux ou qui **participent** au nettoyage et à la désinfection.

Le nettoyage et la désinfection sont donc un partage de responsabilité entre les utilisateurs et l'équipe d'hygiène et salubrité (nous entendons par utilisateur : infirmière, préposé aux bénéficiaires, aide de service, brancardier, médecins, stagiaires, professionnels, etc.). Le rôle de chacun est déterminé dans les fiches procédurales.

- Utilisateur :
 - Chaque utilisateur est responsable du nettoyage de tout équipement médical partagé entre les patients après utilisation
 - Chaque utilisateur est responsable de s'assurer que l'équipement médical a été nettoyé et désinfecté avant de l'utiliser au moyen d'une inspection visuelle visant à déceler la présence de saleté, de débris, de graisse ou de souillures, etc. Si l'on soupçonne qu'il n'a pas été nettoyé ou désinfecté, l'article doit être nettoyé et désinfecté avant utilisation sinon un article nettoyé doit être utilisé. Il ne faut jamais utiliser un équipement qu'on soupçonne souillé.

- Gestionnaire du service ou de l'unité de soins :
 - S'assure que tous les employés concernés ont pris connaissance de cette procédure, savent où elle est accessible et respectent les consignes d'application.
 - Assure un soutien aux équipes dans l'application de la procédure.
 - Veille à ce que les équipes aient accès à l'équipement de protection individuelle (ÉPI) ainsi qu'aux produits nécessaires afin de réaliser le nettoyage et la désinfection de l'équipement médical.
 - Mandate un employé à la réalisation d'audits ponctuels, et ce de façon continue. Ces audits devraient être faits minimalement 4 fois par année.
 - Diffuse les résultats des audits à ses équipes et les sensibilise à l'importance du respect des principes de nettoyage et de désinfection.
 - Élabore un plan d'amélioration de la qualité afin de cibler ce qui doit être ajusté dans le processus et en assure le suivi.
 - S'assure de mettre à jour l'ensemble des membres de son équipe lors d'un changement de produit ou de procédure.

- Employé du service ou de l'unité responsable du nettoyage et de la désinfection :
 - Complète la formation ENA: Nettoyage et désinfection des équipements de soins (ENA ID 1918).
 - Connait la procédure et l'applique rigoureusement (tâches d'exécution, coordination et communication, validation de la propreté et identification de l'équipement, signalement des anomalies, etc.).

- Respecte les spécificités des petits équipements ainsi que l'ÉPI à utiliser afin de travailler de façon sécuritaire.
 - Collabore à la réalisation d'audits selon les demandes de son gestionnaire après avoir reçu une formation spécifique.
 - Collabore au plan d'amélioration de la qualité afin de cibler ce qui doit être ajusté dans le processus.
- Personnel d'hygiène et salubrité :
- Complète la formation ENA: Nettoyage et désinfection des équipements de soins (ENA ID 1918).
 - Selon les procédures de l'établissement, veille au nettoyage et à la désinfection des petits équipements médicaux lors du transfert ou au congé de l'usager ou résident.
 - S'assure que les agents chimiques disponibles respectent la concentration minimale en ingrédient(s) actif(s).
 - Collabore avec les employés responsables du nettoyage et de la désinfection de l'équipement médical lors de situations particulières (ex. : souillures très importantes).
 - Lors d'éclosion, apporte un soutien additionnel à l'unité touchée selon les recommandations de l'équipe de PCI.
Collabore à la réalisation d'audits de façon ponctuelle, et partage les résultats avec le gestionnaire concerné ainsi qu'avec l'équipe de PCI.
- Professionnel en génie biomédical concerné lors d'achat d'équipement médical :
- Sélectionne de l'équipement qui répond aux critères en PCI : facilement désinfectable, lisse et non poreux, sans joint ou espace mort, résistants aux produits désinfectants, etc.
 - Respecte les recommandations du fabricant en validant la disponibilité des produits désinfectants à l'ICM.
 - S'assure que l'information en lien avec la procédure de nettoyage et du produit désinfectant approuvé soient acheminées aux équipes avant d'acheminer l'équipement au terrain.
- Service de prévention et contrôle des infections (PCI) :
- Rédige la procédure et assure sa mise à jour et sa diffusion.
 - Rédige du contenu de formation relativement au nettoyage et à la désinfection de bas niveau des équipements médicaux, ainsi que sur les audits de conformité s'y rattachant.
 - Assure un soutien aux équipes notamment en donnant de la formation formelle et informelle adaptée au public cible pour s'assurer que le nettoyage et la désinfection de bas niveau soient réalisés de façon appropriée et que les trajectoires des équipements propres et souillés soient respectées.
 - Collabore à la réalisation d'audits de façon ponctuelle notamment relativement au respect de la désinfection du matériel entre les patients, à l'entreposage dans la zone appropriée des petits équipements propres et souillés, de la disponibilité suffisante des produits désinfectants appropriés et du marquage par fluorescence en collaboration avec le service d'hygiène et salubrité.
 - Transmets des recommandations en fonction des résultats d'audits.
 - Offre un service d'expert-conseil en cas de besoin et participe à l'élaboration du plan d'amélioration de la qualité en émettant des recommandations.

4. ÉTAPES

Les cinq grands principes en hygiène et salubrité

1. Toujours nettoyer/désinfecter du moins souillé au plus souillé.

Le principe étant d'éviter la contamination croisée et de souiller le matériel d'entretien de manière excessive.

2. Toujours nettoyer/désinfecter les surfaces les plus hautes avant les surfaces les plus basses.

Les surfaces hautes étant de manière générale moins souillées que les surfaces plus basses (exemple : tige à soluté), ce second principe découle donc directement du premier.

3. Toujours utiliser le bon produit pour la bonne situation.

C'est-à-dire utiliser les nettoyeurs pour nettoyer, les désinfectants pour désinfecter. L'ammonium quaternaire stabilisé étant à la fois un nettoyeur et un désinfectant, nous privilégierons son utilisation en tout temps (sauf indication contraire). L'eau de javel peut être requise selon le type de précautions additionnelles tel que lors des isolements *Clostridioides difficile* et *Candida auris*.

4. Le principe d'usage unique.

Le principe d'usage unique implique d'utiliser des linges de microfibre (ou Solution ou lingette de nettoyeur-désinfectant) différents pour chaque environnement d'usage ou, dans le cas qui nous préoccupe ici, des linges ou Solution ou lingettes différents pour chacun des appareils médicaux ou matériels de soin. L'objectif de ce principe est d'éviter la contamination croisée.

5. Les principes du « *high touch* » et du « *low touch* ».

Définition de « *high touch* » :

On entend par surface « *high touch* » toute surface à haut risque de contamination ou matériel qui est **fréquemment en contact avec une personne** (surtout par les mains), principalement l'utilisateur, mais aussi le personnel ou les visiteurs. Cela inclut aussi toute surface ou matériel susceptible d'être contaminé par le sang et les liquides biologiques. Les surfaces « *high touch* » doivent être nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation et, minimalement, une fois par jour.

Définition de « low touch » :

On entend par surface « **low touch** » toute surface à faible potentiel de contamination ou matériel qui est **peu susceptible d'être en contact avec l'utilisateur** (surtout par les mains), mais aussi avec le personnel ou les visiteurs. Les surfaces low touch doivent être nettoyées et désinfectées de manière **périodique** (une fois par semaine et au besoin). Le service d'hygiène et salubrité assurera cette tâche.

Important: Si le niveau de contamination est important, utiliser une nouvelle lingette AVANT de poursuivre la désinfection des surfaces basses.

Légende :



Nettoyage :

Opération qui consiste à enlever les saletés, la poussière et autre substance pouvant héberger des micro-organismes ou permettre leur multiplication; la propreté est l'objectif visé par le nettoyage.

Désinfection :

Opération qui permet d'éliminer la plupart des agents pathogènes présents ou, à tout le moins, d'en empêcher la multiplication sur un objet ou une surface.

PRINCIPE : LE NETTOYAGE EST ESSENTIEL À UNE DÉSINFECTION EFFICACE

Pratiques de base en hygiène et salubrité

Les pratiques de base regroupent toutes les activités d'hygiène et salubrité régulières telles que le nettoyage de l'ameublement de chambre, des accessoires de salle de bain et du lavage des planchers. Il en va de même pour les accessoires de soins et de transport qui entre en contact avec l'utilisateur, soit de manière directe ou indirecte.

- Les techniques de travail, les fréquences d'entretien, les produits et équipements doivent être utilisés de façon à maintenir un environnement propre.
- En adoptant les pratiques de base d'hygiène et salubrité dans les secteurs de soins, déjà le risque de transmission des infections s'en trouve diminué.

Principes généraux

- La qualité du nettoyage dépend de plusieurs facteurs, dont l'action mécanique, l'action chimique et le temps de contact qui sont essentiels afin d'obtenir les résultats voulus. Le temps de contact correspond à la durée de temps nécessaire afin que le produit nettoyant ou désinfectant réalise sa pleine efficacité; l'équipement doit rester humide durant ce délai à respecter.
- Favorisez l'équipement médical dédié à un seul usager lorsque possible, particulièrement pour les usagers nécessitant l'application de précautions additionnelles et pour les équipements ayant un plus haut taux de contamination (ex.: bassine et chaise d'aisance). L'équipement médical dédié devrait tout de même subir une désinfection quotidienne.
- Si l'équipement est visiblement souillé (tâches, liquide biologique), réaliser un nettoyage préalablement à la désinfection, et ce, avec une lingette différente pour chaque étape.
- Advenant l'impossibilité de nettoyer et désinfecter convenablement l'équipement médical à cause de certaines difficultés (ex. : démontage, zones difficilement accessibles), aviser le gestionnaire du service ou de l'unité de soins ainsi que l'équipe de PCI.
- Il faut éviter d'amener à l'intérieur des chambres l'équipement plus difficile à nettoyer et désinfecter (ex.: présence de tissus, clavier électronique). S'il est impossible de laisser cet équipement à l'extérieur de la chambre, il doit être désinfecté après l'utilisation.
- Seuls les articles propres doivent être déposés dans des zones propres dédiées.
- Lorsqu'un équipement n'est plus en bon état et qu'il y a une incapacité à bien le nettoyer/désinfecter (ex. : fissure, déchirure, attache en Velcro saturée de souillures), il doit être retiré de la circulation pour éviter entre autres la transmission de microorganismes pathogènes.
- Tout équipement de soins réutilisable et les articles électroniques ayant été en contact avec un usager ou son environnement doivent subir un nettoyage et une désinfection de bas niveau avant d'être utilisés pour un autre usager.
- L'équipement ou les dispositifs contaminés dont un patient n'a plus besoin doivent être placés dans la salle d'utilité souillée jusqu'à ce qu'ils soient nettoyés et désinfectés.

- Les solutions désinfectantes doivent être placées dans plusieurs endroits où l'équipement est nettoyé et désinfecté pour faciliter l'accès et l'utilisation.
- En cas d'éclosion ou d'événement inhabituel, la fréquence de nettoyage et les recommandations d'utilisation des produits peuvent changer. Le service de PCI informera l'unité des changements nécessaires, en cas d'éclosion ou d'événement inhabituel.

Préparation des agents chimiques pour le nettoyage et la désinfection

- Le produit germicide ammonium quaternaire est préparé par le personnel d'hygiène et salubrité. Le produit est disponible via un proportionneur (doseur automatique) afin d'éviter la mauvaise concentration du produit.
- L'eau de javel est disponible en bouteille, prête à l'emploi.
- Chaque employé d'hygiène et salubrité est responsable de la préparation des produits chimiques sur son unité de travail, et ce, sur chaque quart de travail. Il est aussi responsable de changer/remplacer le germicide lorsque ce dernier est visiblement souillé ou lorsque c'est requis c'est-à-dire avant les pauses et les repas.
- Lors de la préparation de germicide en bouteille, il faut toujours utiliser les contenants appropriés et l'étiqueter. Il faut aussi apposer une étiquette avec la date à laquelle la solution a été préparée. La durée de vie de la solution diluée en bouteille est de 7 jours.
- Le service d'hygiène et salubrité est responsable de la préparation des lingettes désinfectantes disponibles sur les unités de soins et service clinique pour permettre la désinfection des petits équipements par l'utilisateur.

Le personnel d'hygiène et salubrité doit remplir les chaudières de lingettes de type "WetTask" avec la solution appropriée. Il existe deux types de chaudières soit, au germicide ou à l'eau de javel.

Lors de la préparation, l'employé doit utiliser les contenants appropriés et l'étiqueter. Il faut aussi apposer une étiquette avec la date à laquelle la solution a été préparée. Afin de permettre une durée de vie maximale du produit, le couvercle doit toujours demeurer sur la chaudière de lingette. La durée de vie de la préparation de l'ammonium quaternaire est de 7 jours et de la préparation de l'eau de Javel est de 24 heures.

- Au cours de la préparation de produit chimique, il faut toujours respecter le SIMDUT, ne jamais mélanger de produits, respecter les consignes relatives aux dilutions et quantités nécessaires du fabricant. Déposer les sceaux aux endroits désignés.

Utilisation et entreposage des agents chimiques pour le nettoyage et la désinfection

➤ Utilisation

- ✓ Certaines règles communes à l'ensemble des produits en régissent l'utilisation efficace et prudente:

Bien s'informer au préalable sur le produit afin de le manipuler et de l'utiliser avec pertinence, efficacité et sécurité.

Connaître les aspects suivants du produit :

ses caractéristiques (voir fiche signalétique, fiche technique, étiquette du contenant) ;

ses dangers (incompatibilités, antagonismes, danger d'émanation s'il est mélangé avec un autre produit, ou perte d'efficacité en présence de matières organiques, etc.);

les précautions à adopter lors de sa manipulation (voir avertissements, mis en garde les recommandations relatives aux équipements de protection, etc.) ;

les conditions d'utilisation (directives du fabricant sur la dilution, le temps de contact et les précautions).


- ✓ Réaliser une action mécanique de frottement vigoureux avec une force adéquate afin que le processus soit efficace.
- ✓ Privilégier en général l'utilisation de lingettes désinfectantes préimbibées, car ce produit réalise un nettoyage et une désinfection simultanément.
- ✓ Changer de lingette désinfectante quand elle est souillée ou qu'elle n'a plus une quantité suffisante de désinfectant pour rendre l'équipement humide, et ce pour la durée du temps de contact (ex.: pour les équipements de grande taille). Ne jamais retremper la lingette souillée dans le seau de produit désinfectant.
- ✓ Respecter le nombre d'étapes de nettoyage et désinfection requises selon les précautions additionnelles en place, si applicable.

➤ Entreposage

- ✓ Conserver les produits chimiques dans leurs contenants d'origine.
- ✓ Respecter les exigences juridiques relatives aux matières dangereuses sur le lieu du travail. Par exemple, l'entreposage de produit doit être sécuritaire pour les usagers et dans un lieu dédié.
- ✓ Respecter toutes autres directives du fabricant lors de l'entreposage des produits.

Trajectoire appropriée de l'équipement

L'équipement doit toujours se déplacer selon cette trajectoire afin que le nettoyage et la désinfection de bas niveau puissent être effectués par le membre de l'équipe responsable:

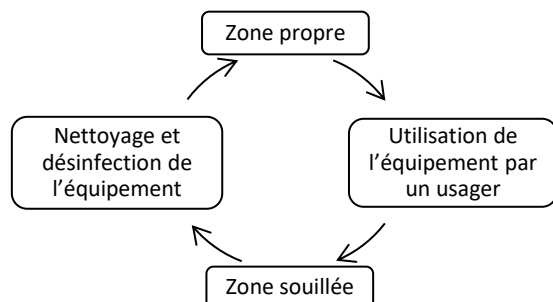

Les pratiques de base impliquent ;

- De toujours porter l'équipement de protection personnel, lorsque nécessaire, avant d'effectuer une tâche (ex.: protection oculaire, masque et blouse selon le risque d'éclaboussures du produit ou des souillures sur l'équipement médical). L'hygiène des mains et le port des gants doivent être rigoureusement respectés en TOUT TEMPS.
- De toujours se laver les mains suite à une opération de nettoyage/désinfection.
- De respecter la séquence chronologique de nettoyage et de désinfection des différents appareils.

Tâches et fréquences

La fréquence du nettoyage et de désinfection des appareils et du matériel :

1. **Entre usagers** : c'est-à-dire après chaque utilisation du matériel. Cette tâche sera confiée aux équipes de soins. La désinfection se fera sur les surfaces « *high touch* » au moyen de Solution ou lingettes de nettoyant-désinfectant.
2. **Quotidienne** : une fois par jour.
3. **Hebdomadaire** : une fois par semaine, chacun des appareils visés sera nettoyé et désinfecté en entier (surfaces « *high et low touch* ») avec l'équipe de soins attitrée aux zones grises.
4. **Périodique** : certains appareils (ex. : réfrigérateur, machine à glace) seront nettoyés et désinfectés en profondeur selon une fréquence déterminée (ex. : aux mois) avec l'équipe de soins attitrée aux zones grises.

N.B. Si un équipement est défectueux ou désuet, veuillez le mentionner à votre chef de service et/ou commis afin de faire une requête de réparation dans le *Guide TI* ou remplacer l'équipement.

Vérification et contrôle de la qualité du nettoyage

1. La surveillance de la désinfection de bas niveau de l'équipement médical est une responsabilité partagée.
2. L'équipe d'hygiène et salubrité doit compléter une liste de DÉSINFECTION HEBDOMADAIRE DES PETITS ÉQUIPEMENTS DE SOINS (Annexe 1) lorsque ceux-ci ne sont pas nettoyés directement dans la chambre lors d'un départ-transfert de patient et/ou lorsque l'équipement est nettoyé de façon hebdomadaire.
3. L'équipe de soins doit compléter une FEUILLE DE CONTRÔLE - DÉSINFECTION HEBDOMADAIRE DES PETITS ÉQUIPEMENTS (ÉQUIPE DE SOINS) (Annexe 2).
4. Les vérifications devraient être effectuées par les équipes de soins infirmiers, les infirmières conseillères en prévention des infections (particulièrement pendant une éclosion) et le service en hygiène et salubrité en complétant la feuille de RÉALISATION DE LA DÉSINFECTION HEBDOMADAIRE DES PETITS ÉQUIPEMENTS DE SOINS (Annexe 3).
5. Des audits de qualités doivent être effectués par les infirmières conseillères en prévention des infections (particulièrement pendant une éclosion), le service d'hygiène et salubrité et le personnel du département. Le marquage par fluorescence et les observations directes sont les deux méthodes employées pour les audits.
6. Évaluer ces indicateurs de suivi relatifs au nettoyage et à la désinfection de bas niveau des petits équipements sur lesquels se base entre autres le plan d'amélioration de la qualité:
 - Le nombre et le type d'incidents de sécurité des usagers signalés relativement au nettoyage et à la désinfection de bas niveau de l'équipement médical;
 - Les résultats d'audits réalisés visant à évaluer l'observance des procédures organisationnelles de nettoyage et de désinfection de bas niveau de l'équipement médical;
 - La rétroaction simultanée des équipes de soins sur l'application de la procédure de l'ICM pour le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical;
 - La rétroaction des équipes de soins sur la formation reçue à l'ICM sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical.

Produits à utiliser et nombre d'étapes selon les types de précautions additionnelles

Nombre d'étapes	Précautions additionnelles	Exemples de situations infectieuses	Produit à utiliser **À garder hors de la portée des usagers**
1 étape	CONTACT ET GOUTTELETTES	<ul style="list-style-type: none"> • Virus respiratoires communs sans IMGA ni instabilité hémodynamique ou respiratoire : <ul style="list-style-type: none"> • Influenza • Covid-19 • VRS • Parainfluenza • Metapneumovirus • Rhinovirus • Entérovirus • Autres • SARM • BMR (BGNMR (bacilles Gram négatif multirésistants) et BGNPC (bacilles à Gram négatif producteurs de carbapénémases) • Conjonctivite • Streptocoque A (maladie invasive (syndrome semblable au choc toxique/ bactériémie/ pneumonie) et infection cutanée étendue (ex: fasciite nécrosante) • Coqueluche • Oreillons • Méningite • Rubéole 	<p>Produit nettoyant désinfectant de routine (<u>germicide quaternaire</u>) <u>utilisé avec lingettes</u></p> <p>VERT-2-GO Temps de contact de 10 minutes</p>
	CONTACT, AÉRIEN ET PROTECTION OCULAIRE	<ul style="list-style-type: none"> • Virus respiratoires communs <u>instables</u> • SRAS • MRSI • Zona disséminé • Zona localisé (patient immunodéprimé) • Rougeole • Grippe aviaire • Varicelle • Variole simienne • Nouvelle maladie émergente 	
	AÉRIEN	<ul style="list-style-type: none"> • Tuberculose 	

<p style="text-align: center;">2 étapes (Répéter 2 fois la désinfection)</p>	<p style="text-align: center;">CONTACT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ERV • Zona localisé (patient immunocompétent) • Herpès disséminé 	<p style="text-align: center;">Produit nettoyant désinfectant de routine (<u>germicide quaternaire</u>) utilisé avec lingettes</p> <p style="text-align: center;">VERT-2-GO Temps de contact de 10 minutes</p>
<p style="text-align: center;">3 étapes</p>	<p style="text-align: center;">CONTACT +</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gastroentérite • Candida Auris • C. Difficile (hygiène des mains à l'eau et au savon obligatoire) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Produit nettoyant désinfectant de routine (germicide quaternaire, VERT-2-GO) utilisé avec lingettes (temps de contact de 10 minutes) 2) Rincer avec eau tiède 3) Produit nettoyant désinfectant sporicide (eau de Javel Ali-Flex) utilisé avec lingettes et laisser agir 10 minutes

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
<p>Temps de contact à respecter: Il est essentiel de bien mouiller la surface à nettoyer, de ne pas essuyer par la suite et d'attendre que celle-ci soit sèche avant de pouvoir être utilisée à nouveau.</p>
<p>Le matériel en tissu doit être mis à la machine à laver à l'eau chaude avec un détergent et séché à la machine à température élevée (chaude) (Ex. : vêtements, housses, etc.)</p>

Fiches procédurales :

Désinfection des équipements partagés








APPAREIL D'ÉCHOGRAPHIE DES MÉDECINS

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
 - ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**






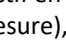








SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Prenez une Solution ou lingette de nettoyant-désinfectant et désinfectez dans cet ordre :



1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et sa base, 
2. Les poignées de transport (avant et arrière) incluant tout le prolongement latéral de la poignée avant, 
3. Les crochets sous le plateau servant à supporter les câbles électroniques, 
4. Les boutons de contrôle de l'appareil et le dessus du plateau, 
5. Toutes les surfaces du petit écran, 
6. Chacune des sondes et leur câble électronique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
7. Les bouteilles de gel. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et sa base, 
2. Les poignées de transport (avant et arrière) incluant tout le prolongement latéral de la poignée avant, 
3. Les crochets sous le plateau servant à supporter les câbles électroniques, 
4. Les boutons de contrôle de l'appareil et le dessus du plateau, 
5. Toutes les surfaces du petit écran, 
6. Chacune des sondes de l'appareil et leur câble respectif en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
7. Les bouteilles de gel 
8. Les surfaces dessous le plateau, 
9. Le pied de soutien noir de l'appareil (en forme de Y, du haut vers le bas), 
10. Toutes les surfaces de la base de l'appareil où sont connectés les câbles des sondes, 
11. Le câble d'alimentation de l'appareil en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
12. Le plateau de recueil à l'avant de l'appareil, 
13. Les barres noires connectant la base de l'appareil aux roues, 
14. Toutes les surfaces des roues et leur manivelle de blocage 

VISUELLEMENT

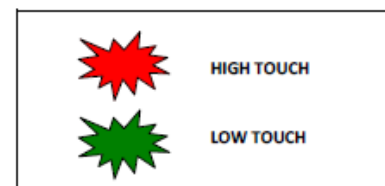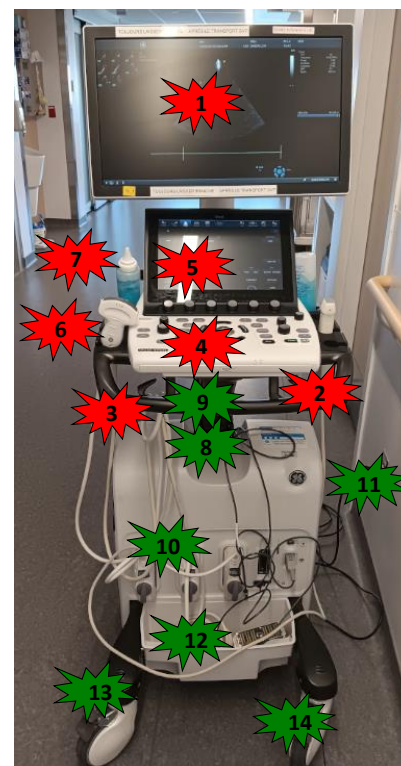




APPAREIL DE GESTION DE TEMPÉRATURE *Arctic Sun*

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
 - ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**






SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Prenez une Solution ou lingette de nettoyeur-désinfectant et désinfectez dans cet ordre :


1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et de la base de l'appareil, 
3. Les lignes de distribution de fluide en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure). 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :





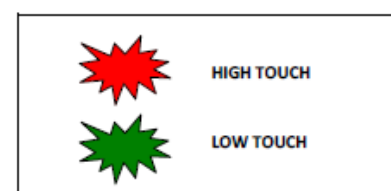





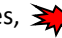




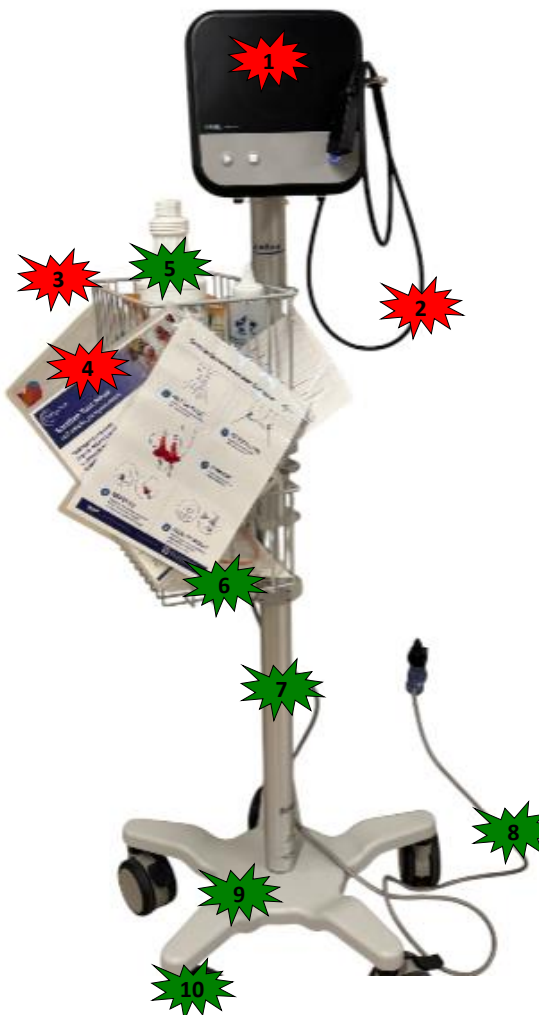

1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et de la base de l'appareil, 
3. Les lignes de distribution de fluide en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 
4. Le câble d'alimentation en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
5. Les roues. 

VISUELLEMENT



APPAREIL DE PHOTODÉSINFECTION NASALE STERIWAVE

Matériel requis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant <p>*TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION</p>
------------------------	--

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Prenez une Solution ou lingette de nettoyant-désinfectant et désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle et sa base,  2. Le câble électronique connecté au patient en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure),  3. Les lunettes de protection,  4. Les fiches informatives plastifiées.  	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;">  HIGH TOUCH  LOW TOUCH </div>
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS	
<p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle et sa base,  2. Le câble électronique connecté au patient en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure),  3. Les lunettes de protection,  4. Les fiches informatives plastifiées,  5. Les bouteilles contenues dans le panier,  6. Les paniers,  7. La tige au complet (du haut vers le bas),  8. Le câble d'alimentation électrique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure),  9. Le pied de l'appareil,  10. Les roues.  	






APPAREIL D'ÉVALUATION DU VOLUME VÉSICAL (BLADDER SCAN)

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
- OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR











Désinfectez dans cet ordre :

1. Le plateau, 
2. Le boîtier de l'appareil, 
3. La poignée de transport, 
4. Le cordon de la sonde ainsi que la sonde elle-même, 
5. La bouteille de gel. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS


Videz les espaces de rangements.

Désinfectez dans cet ordre :



1. Le plateau et l'espace de rangement, 
2. Le boîtier de l'appareil et l'assécher immédiatement, 
3. La poignée de transport, 
4. Le cordon de la sonde ainsi que la sonde elle-même, 
5. La bouteille de gel, 
6. Le dessous du plateau ou le panier et crochets selon le cas, 
7. La tige (du haut vers le bas), 
8. Le support à Solution ou lingettes, 
9. Les pattes, 
10. Les roues. 

Bien assécher l'appareil après le nettoyage.

Ne pas immerger l'appareil ou la sonde dans une Solution ou lingette désinfectante.

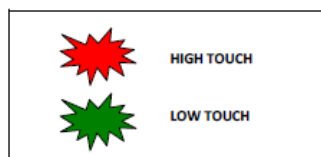

VISUELLEMENT

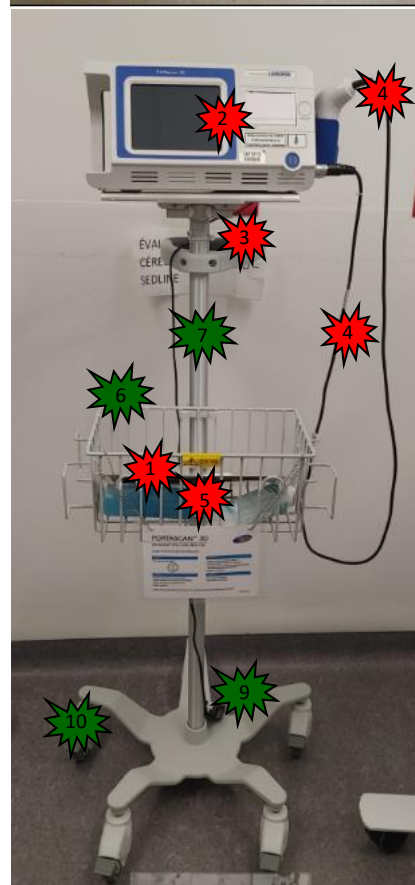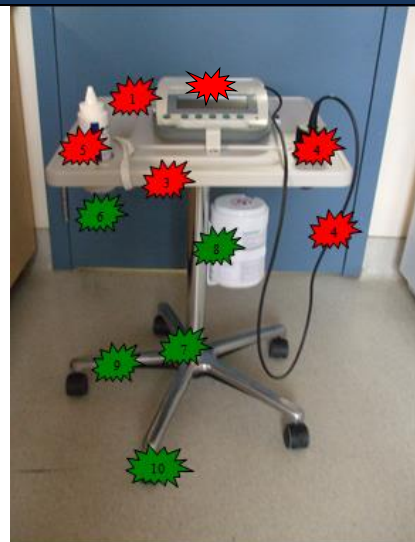

APPAREIL *GlideScope*






Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**










SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et sa poignée, 
3. Le plateau fixé sur la tige de l'appareil, 
4. Les câbles électroniques de l'appareil en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 
5. La surface extérieure des paniers. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS



Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et sa poignée, 
3. Le plateau fixé sur la tige de l'appareil, 
4. Les câbles électroniques de l'appareil en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 
5. La surface extérieure des paniers, 
6. La tige de support de l'appareil (du haut vers le bas) et ses crochets, 
7. Le câble d'alimentation de l'appareil en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
8. Les pattes, 
9. Les roues. 

Une fois au 3 mois, videz l'ensemble des paniers et procédez à une désinfection complète de l'intérieur :

10. Videz un à un les paniers et désinfectez-les,
11. Remplacez le matériel dans les paniers.

VISUELLEMENT

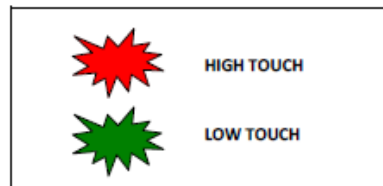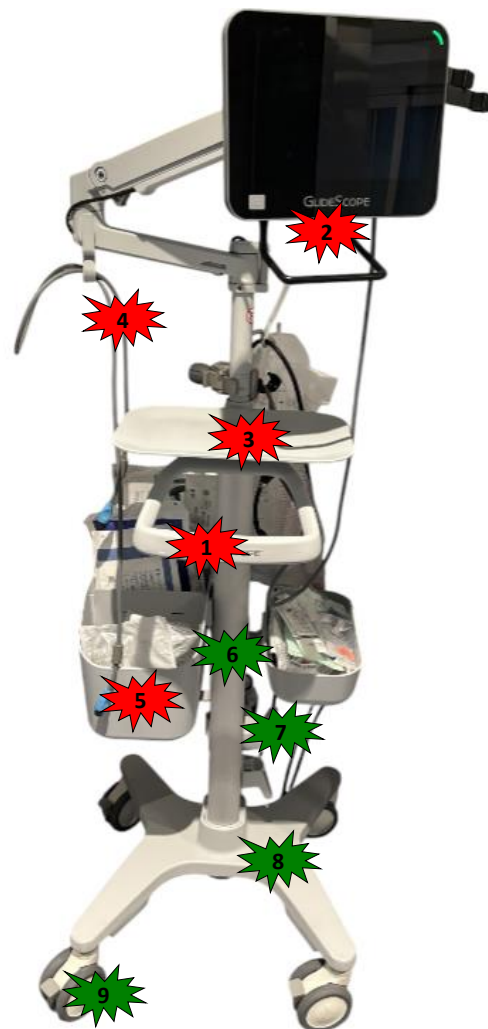




APPAREIL POUR BAS DE COMPRESSIONS INTERMITTENTS

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant




SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces du dispositif de compression, 
2. Les tubulures en partant de la base vers l'extrémité, 
3. Le cordon d'alimentation électrique. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces du dispositif de compression, 
2. Les tubulures en partant de la base vers l'extrémité, 
3. Le cordon d'alimentation électrique. 

VISUELLEMENT



Instrument entièrement high touch




APPAREIL VOCERA ET SPECTRALINK


Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
 - ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez toutes les surfaces de l'appareil 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez toutes les surfaces de l'appareil 

VISUELLEMENT



Instrument entièrement high touch




ARRÊT STOP

Matériel requis


- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE QUOTIDIENNE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Nettoyage 1 à 2 fois/jour. 


Remplissage sur demande.

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez l'ensemble de l'appareil en partant du haut vers le bas. 

Terminez par les roulettes. 

VISUELLEMENT

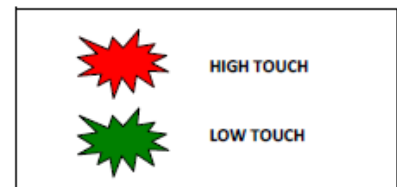

BALANCE HYGIÈ

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE QUOTIDIENNE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Seulement si la balance est dans une chambre :

Désinfectez en partant du haut vers le bas. ✖

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez en partant du haut vers le bas. ✖

VISUELLEMENT



Instrument entièrement high touch






BÉQUILLE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant





SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :



1. Support à aisselles, 
2. Appuis main, 
3. Tige du haut, 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Support à aisselles, 
2. Appuis main, 
3. Tige du haut, 
4. Tige du bas et pieds, 

VISUELLEMENT

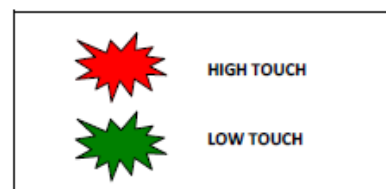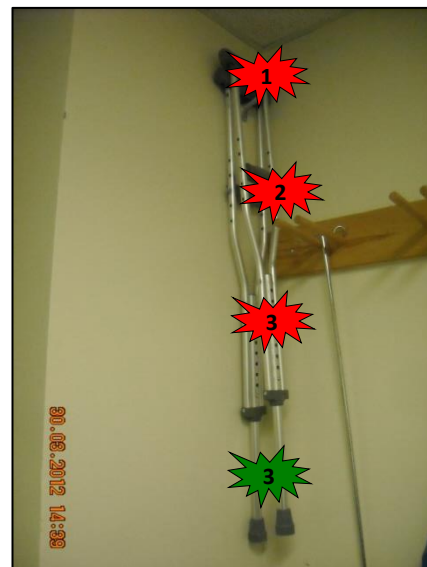



CABARET À PANSEMENT ET CABARET POUR PRÉLÈVEMENT

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR





Désinfecter dans cet ordre :

1. La poignée du cabaret à pansement, 
2. L'extérieur du cabaret. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS


Vider complètement le cabaret.

Désinfecter dans cet ordre :

1. La poignée du cabaret, 
2. L'extérieur du cabaret, 
3. Le dessous du cabaret, 
4. L'intérieur du cabaret. 

Remettre le matériel dans le cabaret.

VISUELLEMENT

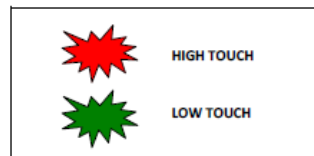

CÂBLE ÉLECTRONIQUE (ex : câble pour sonde thermique, pour capteur à pression, pour Swan, etc.)


Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR


Désinfectez :

1. Le câble et ses embouts en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure). 



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez :

1. Le câble et ses embouts en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure). 



Instrument entièrement high touch



CHAISE D'AISANCE









Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Nettoyez d'abord toutes les souillures visibles sur la chaise et changez de Solution ou lingette.

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les poignées de transport, 
2. Le dossier avant de la chaise, 
3. Le support à bouteille, 
4. Les appuis bras, 
5. La ceinture de sécurité, 
6. L'extérieur du couvercle de la cuve, 
7. L'intérieur du couvercle de la cuve, 
8. Le banc de la chaise (dessus et dessous), 



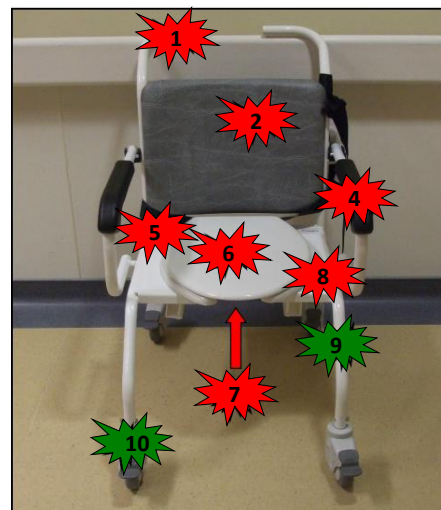







VISUELLEMENT




SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Nettoyez d'abord toutes les souillures visibles sur la chaise et changez de Solution ou lingette.

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le dossier de la chaise (avant et arrière), 
2. Le support à bouteille, 
3. Les appuis bras, 
4. La ceinture de sécurité, 
5. Les poignées de transport, 
6. L'extérieur du couvercle de la cuve, 
7. L'intérieur du couvercle de la cuve, 
8. Le banc de la chaise (dessus et dessous), 
9. Les 4 pattes, 
10. Les 4 roues. 

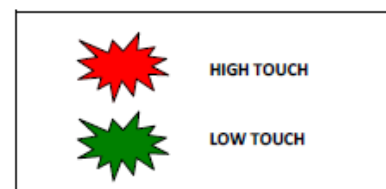









CHARIOT À CODE ET CHARIOT COVID DU 3^E CENTRE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR







Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Le devant des tiroirs avant et du rangement latéral (du haut vers le bas), 
3. Le dessus du chariot et les surfaces externes des éléments s'y trouvant si applicable (ex: couvertures de cartable, bouteille de gel, façade de coffret, etc.), 
4. Moniteur/ défibrillateur cardiaque Lifepak (se référer à la page 69), 
5. Toutes les façades du coffre d'inhalothérapie au-dessus du chariot incluant ses poignées (si applicable), 
6. La tige de soluté et les éléments qui y sont accrochés (fiches informatives plastifiées, rasoir, etc.) si applicable 
7. L'appareil à succion et les tubulures de raccord entre l'appareil à succion et le dispositif collecteur à succion 
8. le dispositif collecteur à succion 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :


Répéter les étapes ci-haut de 1 à 8 

9. Les câbles électroniques (pour le rasoir, l'appareil à succion, le moniteur/ défibrillateur cardiaque Lifepak) en partant de la base vers l'extrémité, 
10. La bonbonne d'oxygène, 
11. L'arrière du chariot, 
12. Le câble d'alimentation en partant de la base vers l'extrémité, 
13. Le petit tabouret pliable, 
14. Nettoyez les roues du chariot 

Une fois au 3 mois, videz l'ensemble du chariot des fournitures et procédez à une désinfection complète des tiroirs :





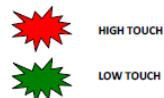






15. Videz un à un les tiroirs individuels et le rangement latéral et désinfectez-les.,
16. Remplacez le matériel dans les tiroirs et le rangement latéral.

VISUELLEMENT



CHARIOT À MÉDICAMENTS

Matériel requis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant
------------------------	--

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Avant chaque utilisation :</p> <ol style="list-style-type: none"> Désinfecter la surface de travail lors de la préparation des médicaments (Dessus du chariot).  	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS	
<p>Enlevez le plastique protecteur sur le dessus du chariot.</p> <p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> Le dessus du chariot,  Le support et la bouteille de gel,  Le distributeur à gobelet,  L'avant du chariot (chacune des poignées des tiroirs),  L'intérieur des compartiments de rangement,  Les deux côtés et l'arrière du chariot,  Les roues.  <p>TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSUYER À SEC LE DEVANT DES ÉTIQUETTES À CODES À BARRES</p> <p>Désinfectez les 2 côtés du plastique protecteur et essuyez-les à sec avant de le remettre en place. </p> <p>Videz la poubelle (à l'arrière).</p> <p>Désinfectez l'intérieur de la poubelle et remettez un sac à l'intérieur. </p> <p>Remplacez le matériel dans les compartiments de rangement.</p> <p>Une fois aux 6 mois, désinfection des tiroirs à médicament par la pharmacie identifiée par code de couleur pour certifier la désinfection.</p>	




CHARIOT À INSTRUMENTATION, À PANSEMENTS, D'ISOLEMENT ET DE MATÉRIEL POUR BRONCHOSCOPIE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant







SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR


Désinfectez dans cet ordre :

1. La façade avant des tiroirs (du haut vers le bas), 
2. Chaque poignée, 
3. Le dessus du chariot. 


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. La façade avant des tiroirs (du haut vers le bas), 
2. Chaque poignée, 
3. Le dessus du chariot, 
4. Les côtés et l'arrière du chariot, 
5. Le dessus des roues, 
6. Les roues et leurs freins. 

Une fois au 3 mois, videz l'ensemble du chariot des fournitures et procédez à une désinfection complète des tiroirs : 

7. Videz un à un les tiroirs individuels et désinfectez-les,
8. Remplacez le matériel dans les tiroirs.

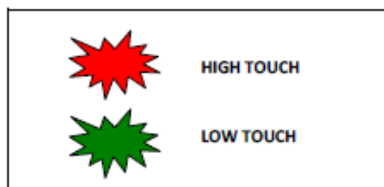

VISUELLEMENT



CHARIOT DE FOURNITURES ET ÉTAGÈRES (JUSTE À TEMPS OU CORRIDOR)

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Façade des tiroirs ou des bacs, dessus des tablettes s'il y a lieu, poignées, dessus et côté.


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ANNUELLE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez l'ensemble de l'appareil en partant du haut en descendant vers le bas.

Terminez par les roulettes de l'appareil.

N.B. Une fois par année, videz l'ensemble du chariot des fournitures et procédez à une désinfection complète des paniers.

VISUELLEMENT

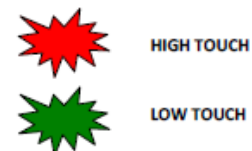

CHARIOT DE LINGERIE

Matériel requis



- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

AUCUNE DÉSINFECTION ENTRE USAGERS, CAR LE CHARIOT NE DOIT PAS ENTRER DANS LES CHAMBRES DE PATIENTS


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Désinfectez l'ensemble de l'appareil du haut vers le bas. 
2. Terminez par les roulettes. 

2 fois par année, videz l'ensemble du chariot de linge et procédez à une désinfection complète (du haut vers le bas).

VISUELLEMENT

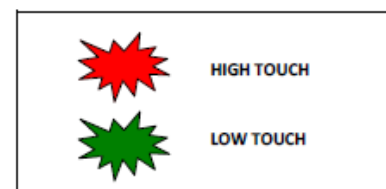





CHARIOT DE SOINS ET CHARIOT DE THORACOTOMIE DU 3^E NORD

Matériel requis


- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Le plateau, 
3. L'extérieur des paniers (du haut vers le bas), 
4. Le couvercle du contenant à déchets piquant-tranchant (si applicable). 








SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Façade des tiroirs, poignées et plateau. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ANNUEL / ÉQUIPE DE SOINS


Videz le chariot de son contenu.

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Le plateau, 
3. L'extérieur des paniers (du haut vers le bas), 
4. Le couvercle du contenant à déchet piquant-tranchant (si applicable), 
5. La structure du chariot, 
6. L'intérieur des tiroirs/tablettes, 
7. Les roues du chariot. 

Remplacez le matériel dans les contenants.

VISUELLEMENT

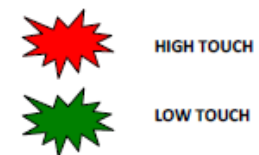


CHARIOT DE TRANSPORT À CYLINDRE DE GAZ MÉDICAL

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant




SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les poignées de transport. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

2. Les poignées de transport, 
3. L'ensemble des tiges, 
4. Les roues. 

VISUELLEMENT



HIGH TOUCH



LOW TOUCH




CHARIOT D'INSTRUMENTATION DU 3^E NORD

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant






SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR


Désinfectez dans cet ordre :

1. Les façades des paniers (du haut vers le bas), 
2. La poignée de transport, 
3. Remettre un nouveau piqué propre sur le dessus de chaque étage du chariot. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS


Désinfectez dans cet ordre :

1. Les façades des paniers (du haut vers le bas), 
2. La poignée de transport. 
3. Remettre un nouveau piqué propre sur le dessus de chaque étage du chariot, 
4. L'ensemble du chariot du haut vers le bas, 
5. Les plexiglass latéraux du haut vers le bas,
6. Les roues. 

Une fois au 3 mois, videz l'ensemble du chariot des fournitures et procédez à une désinfection complète des tiroirs 

7. Videz un à un les tiroirs individuels et désinfectez-les,
8. Replacez le matériel dans les tiroirs.

VISUELLEMENT

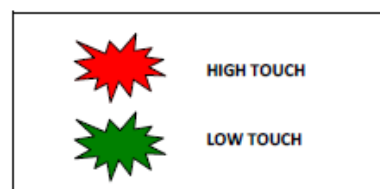





CHARIOT RÉINTUBATION D'INHALOTHÉRAPIE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant







SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR


Désinfectez dans cet ordre :

1. La façade avant des tiroirs (du haut vers le bas), 
2. Chaque poignée, 
3. Le dessus du chariot, 
4. Toutes les façades du coffre au-dessus du chariot incluant ses poignées. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS


Désinfectez dans cet ordre :

1. La façade avant des tiroirs (du haut vers le bas), 
2. Chaque poignée, 
3. Le dessus du chariot, 
4. Toutes les façades du coffre au-dessus du chariot incluant ses poignées, 
5. Les côtés et l'arrière du chariot (du haut vers le bas), 
6. Les roues et les freins. 

Une fois au 3 mois, videz l'ensemble du chariot des fournitures et procédez à une désinfection complète des tiroirs : 

7. Videz un à un les tiroirs individuels et désinfectez-les,
8. Remplacez le matériel dans les tiroirs.

VISUELLEMENT

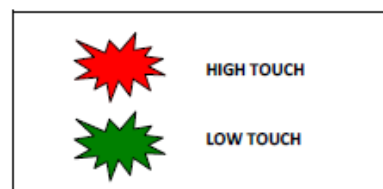

CIVIÈRE







Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR











SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le matelas (dessus et dessous) ainsi que le plateau sous le matelas, 
2. Les oreillers (tous les côtés), 
3. Les ridelles au complet, 
4. La tige à soluté et le support à cylindre à oxygène, 
5. Les poignées de transport, 
6. Le plateau sous la civière (seulement si utilisé). 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE MENSUEL / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le matelas (dessus et dessous) ainsi que le plateau sous le matelas, 
2. Les oreillers (tous les côtés), 
3. Les ridelles au complet, 
4. Le contour de la civière, 
5. La tige à soluté et le support à cylindre à oxygène, 
6. Les poignées de transport, 
7. Le plateau sous la civière, 
8. Le caoutchouc des pieds pneumatiques, 
9. Les différentes pédales, 
10. Les quatre roues. 



HIGH TOUCH



LOW TOUCH


COAGUCHECK, GLUCOMÈTRE, APPAREIL I-STAT

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Jetez la bandelette souillée.

1. Toutes les surfaces de l'appareil, 


VISUELLEMENT



Instrument entièrement high touch



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

1. Toutes les surfaces de l'appareil, 





CYLINDRE À GAZ MÉDICAL ET DÉBITMÈTRE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant






SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE UTILISATION / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Le cadran du débitmètre, 
2. La valve du débitmètre, 
3. Le protecteur du débitmètre (si applicable), 
4. La poignée du support. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le cadran du débitmètre, 
2. La valve du débitmètre, 
3. Le protecteur du débitmètre (si applicable), 
4. La poignée du support, 
5. Le cylindre 

VISUELLEMENT

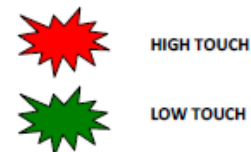



DISTRIBUTEUR À MÉDICAMENTS

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE QUOTIDIENNE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :






1. Le clavier et les contours du moniteur, 
2. Le devant de l'appareil (de haut en bas). 

**TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE ET ESSUYER À SEC
LE CLAVIER ET L'ÉCRAN**

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Nettoyez le lecteur optique à empreinte digitale avec un **tampon d'alcool**. 

Désinfectez dans cet ordre :


1. Le clavier et les contours du moniteur, 
2. Le devant de l'appareil (de haut en bas), 
3. Le dessus de l'appareil (en arrière du moniteur), 
4. Les côtés de l'appareil (si accessibles), 
5. Le dessous (accessible). 

Prendre un linge **légèrement** humide et nettoyer :

6. L'écran 

Une fois par année, désinfection des tiroirs à médicament par la pharmacie.

VISUELLEMENT

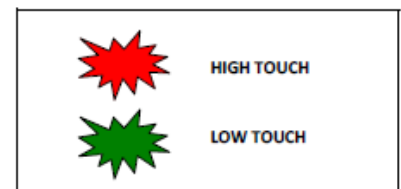

DOPPLER MOBILE SUR PIEDS





Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**









SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :



1. Toutes les surfaces du boîtier du doppler, 
2. Le câble en partant de la base vers l'extrémité, 
3. La sonde, 
4. Les bouteilles de gel. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces du boîtier du doppler, 
2. Le câble en partant de la base vers l'extrémité, 
3. La sonde, 
4. Les bouteilles de gel, 
5. La tige au complet (du haut vers le bas), 
6. Le panier, 
7. Le pied de l'appareil, 
8. Les roues. 

VISUELLEMENT

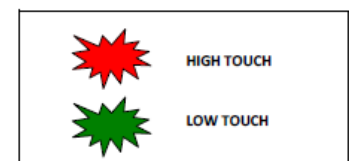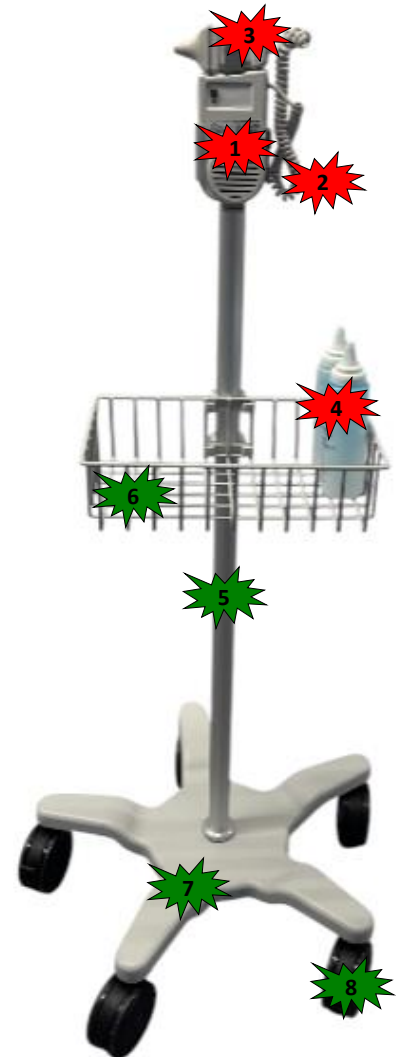

DOPPLER PORTATIF




Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces du boîtier du doppler, 
2. Le câble en partant de la base vers l'extrémité, 
3. La sonde. 

VISUELLEMENT






Instrument entièrement high touch



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces du boîtier du doppler, 
2. Le câble en partant de la base vers l'extrémité, 
3. La sonde. 

DOSSIERS

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE AU CONGÉ ET AU TRANSFERT DE L'USAGER

Lors d'un congé ou d'un transfert, la commis doit désinfecter le dossier **en débutant par le dessus pour terminer par le dedans.**

Ne pas oublier les séparateurs.

SÉQUENCE AU 3 MOIS / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. La roulette à dossier de l'extérieur vers l'intérieur.
2. Chaque séparateur dans le dossier
3. Désinfectez au complet les dossiers.

VISUELLEMENT

Extérieur du dossier



Au départ du patient par la commis.

Intérieur du dossier



Au départ du patient par la commis.






ÉLECTROCARDIOGRAPHE MOBILE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR











Prenez une Solution ou lingette de nettoyant-désinfectant et désinfectez dans cet ordre :

1. Le boîtier des fils, 
2. Chacun des fils à ventouses et les clips, 
3. Le dessus de l'écran, 
4. Les boutons de contrôle de l'appareil, 
5. La poignée de transport. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Videz les compartiments de rangement de leur contenu.

Désinfectez dans cet ordre :



1. Le boîtier des fils, 
2. Chacun des fils à ventouses et les clips, 
3. Le dessus de l'écran, 
4. Les boutons de contrôle de l'appareil, 
5. La poignée de transport, 
6. L'intérieur et l'extérieur des compartiments de rangement, 
7. Les côtés et le dessous du plateau, 
8. La tige centrale (au complet) sous l'appareil, 
9. Le pied de l'appareil, 
10. Les roues de l'appareil. 

Prendre un linge **légèrement** humide et nettoyer :

11. L'écran 

Remettez le contenu des compartiments de rangement en place.

VISUELLEMENT

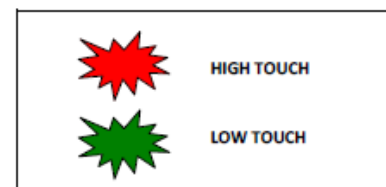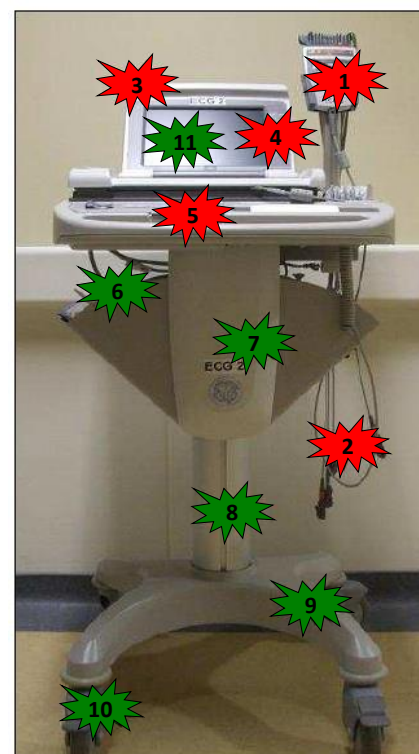

FAUTEUIL À PRÉLÈVEMENT





Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR







SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE QUOTIDIENNE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :


1. Le dossier, 
2. Le siège, 
3. Les appuis pieds, 
4. Les appuis bras. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE MENSUEL / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le dossier, 
2. Le siège, 
3. Les appuis pieds, 
4. Les appuis bras, 
5. Tous les côtés sous la chaise, 
6. Les pattes de la chaise. 

CLINIQUES AMBULATOIRES

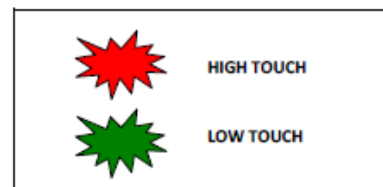




FAUTEUIL D'EXAMEN MÉDICAL

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant






SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Le dossier et siège, 
2. Les appuis bras, 
3. Porte-rouleau sous l'appuie-tête. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le dossier et fessier, 
2. Les appuis bras, 
3. Porte-rouleau sous l'appuie-tête. 
4. Tous les côtés du fauteuil, 
5. Pédales de contrôle. 

VISUELLEMENT

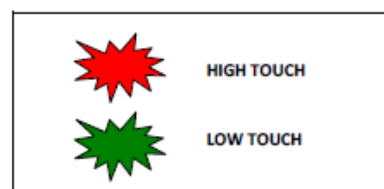

FAUTEUIL GÉRIATRIQUE








Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR












SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :


1. Les appuis-tête du fauteuil, 
2. Le dossier du fauteuil, 
3. Le siège du fauteuil, 
4. Les côtés (intérieurs et extérieurs) du fauteuil, 
5. Les appuis-bras, 
6. La tablette ou la ceinture (si applicable), 
7. La poignée de transport, 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE MENSUEL / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les appuis-tête du fauteuil, 
2. Le dossier du fauteuil, 
3. Le siège du fauteuil, 
4. Les côtés (intérieurs et extérieurs) du fauteuil, 
5. Les appuis-bras, 
6. La tablette ou la ceinture (si applicable), 
7. La poignée de transport, 
8. Sous le siège (tiges comprises), 
9. L'appui-jambes, 
10. L'appui-pieds, 
11. Toutes les surfaces des roues et leur manivelle de blocage, 

CLINIQUES AMBULATOIRES

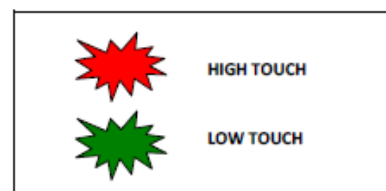



FAUTEUIL PATIENT-VISITEUR

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :





1. Le dossier et siège, 
2. Les appuis-bras. 

VISUELLEMENT



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE/ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le dossier et siège, 
2. Les appuis-bras, 
3. Tous les côtés du fauteuil (devant, Latérale, arrière), 
4. Les quatre pattes (du haut vers le bas). 



FAUTEUIL ROULANT (transport/multi-usager)

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfecter dans cet ordre :

1. Le dossier du fauteuil
2. Le siège du fauteuil
3. Les côtés (intérieurs et extérieurs) du fauteuil
4. Les appui-bras
5. La tablette ou la ceinture (si applicable)
6. La tige à soluté
7. Les poignées de transport
8. Les manivelles d'ajustement du fauteuil (blocage des appuis-pieds – verrouillage des pneus)
9. Le cerceau de mobilisation des roues

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE MENSUEL / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Actionnez le mécanisme de verrouillage des roues.

Désinfecter dans cet ordre :

1. Le dossier avant du fauteuil
2. Le siège de la chaise
3. Les côtés (intérieurs et extérieurs) du fauteuil
4. Les appui-bras
5. La tige à soluté
6. Les manivelles d'ajustement du fauteuil (blocage des appuis-pieds – verrouillage des pneus)

Basculer le fauteuil vers l'arrière et appuyer les poignées de transport au sol. Continuer la désinfection dans cet ordre :


7. Sous le siège (tiges comprises)
8. Les roues avant et arrière (rayons compris)
9. Les appuis jambes et appuis pieds

Remettre le fauteuil en position debout.

CHANGER DE LINGE et désinfecter les poignées de transport

Désengagez le mécanisme de verrouillage des roues.

VISUELLEMENT

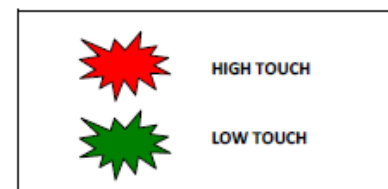

FAUTEUIL ROULANT (longue durée/usager unique)

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfecter dans cet ordre :

1. Le dossier du fauteuil
2. Le siège du fauteuil
3. Les côtés (intérieurs et extérieurs) du fauteuil
4. Les appui-bras
5. La tablette ou la ceinture (si applicable)
6. La tige à soluté
7. Les poignées de transport
8. Les manivelles d'ajustement du fauteuil (blocage des appuis-pieds – verrouillage des pneus)
9. Le cerceau de mobilisation des roues

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE PÉRIODIQUE (4X/AN) / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Actionnez le mécanisme de verrouillage des roues.

Désinfecter dans cet ordre :

1. le dossier avant du fauteuil
2. le siège de la chaise
3. les côtés (intérieurs et extérieurs) du fauteuil
4. les appui-bras
5. la tige à soluté
6. les manivelles d'ajustement du fauteuil (blocage des appuis-pieds – verrouillage des pneus)

Basculer le fauteuil vers l'arrière et appuyer les poignées de transport au sol.
Continuer la désinfection dans cet ordre :


7. sous le siège (tiges comprises)
8. les roues avant et arrière (rayons compris)
9. les appuis jambes et appuis pieds

Remettre le fauteuil en position debout.

CHANGER DE LINGE et désinfecter les poignées de transport

Désengagez le mécanisme de verrouillage des roues.

VISUELLEMENT

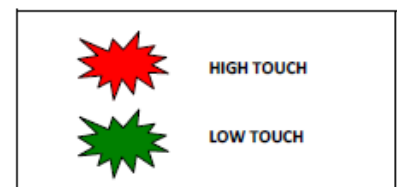



GLACIÈRE POUR LE TRANSPORT À PRÉLÈVEMENTS

Matériel requis


- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :





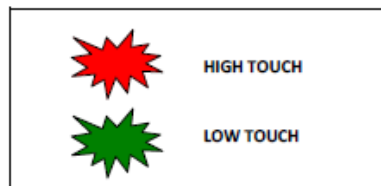

1. Le dessus et la poignée de transport de la glacière, 
2. Les quatre côtés la glacière, 

VISUELLEMENT



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le dessus la glacière, 
 2. Les quatre côtés la glacière, 
 3. La poignée de transport, 
 4. L'intérieur du couvercle, 
 5. L'intérieur la glacière (toutes les surfaces), 
- Le dessous la glacière. 


GUITARE À CHEVEUX

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Videz l'eau de la guitare.

Désinfectez toutes les surfaces de la guitare. 


VISUELLEMENT



Instrument entièrement high touch



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez toutes les surfaces de la guitare. 



HORLOGE MOBILE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant






SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. L'écran de l'horloge, 
2. Le cadre de l'horloge. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS















Désinfectez dans cet ordre :

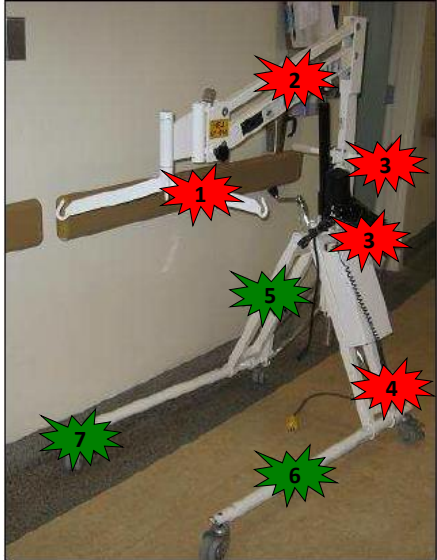1. L'écran de l'horloge, 
2. Le cadre de l'horloge, 
3. La tige au complet (du haut vers le bas), 
4. Le pied de l'appareil, 
5. Les roues de l'appareil. 

VISUELLEMENT



LÈVE-PATIENT MOBILE ÉLECTRIQUE

<p>Matériel requis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le support à lève patient,  2. Le bras hydraulique,  3. Les poignées de transport,  4. Les commandes de l'appareil.  <p>N.B. Faire laver à la buanderie la toile de transport entre chaque usager si elle n'est pas dédiée.</p>	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS	
<p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le support à lève patient,  2. Le bras hydraulique,  3. Les poignées de transport,  4. Les commandes de l'appareil,  5. Le corps de l'appareil,  6. Les pattes de l'appareil et le boîtier électrique,  7. Les roues de l'appareil.  	<div data-bbox="1101 1094 1482 1276" style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;">  HIGH TOUCH  LOW TOUCH </div>



LÈVE-PATIENT SUR RAIL

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :




1. La télécommande, 
2. Le support crochet de toile lève-patient. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. La télécommande, 
2. Le support crochet de toile lève-patient, 

Une fois par mois :

3. Le moteur, 
4. Les fils électriques, 
5. Le rail. 

N.B. Les toiles doivent être envoyées à la buanderie lors du départ de l'utilisateur.

VISUELLEMENT



MACHINE À HÉMOFILTRATION (CVVH)







Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**



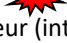







SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS/UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :



1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et sa base, 
2. Toutes les surfaces (avant, latérales, arrière et dessus) du circuit et les éléments qui y sont intégrés (poignées latérales et arrière, pompes, capteur et port de pression, clamps, manivelle, mécanismes de pesons frontaux, chargeur, ensemble pousse-seringue, port de série/USB etc.), 
3. Le fil métallique attaché à la poignée arrière et la pince hémostatique qui lui est reliée, 
4. Toutes les surfaces du réchauffeur (intérieurs et extérieurs),
5. Le lecteur de code-barres et son câble électronique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
6. Le câble électronique et le fil d'alimentation connectés au réchauffeur en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
7. Le câble d'alimentation connecté à l'arrière du circuit, en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure). 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle et sa base, 
2. Toutes les surfaces (avant, latérales, arrière et dessus) du circuit et les éléments qui y sont intégrés (poignées latérales et arrière, pompes, capteur et port de pression, clamps, manivelle, mécanismes de pesons frontaux, chargeur, ensemble pousse-seringue, port de série/USB etc.), 
3. Le fil métallique attaché à la poignée arrière et la pince hémostatique qui lui est reliée, 
4. Toute les surfaces du réchauffeur (intérieurs et extérieurs) 
5. Le lecteur de code-barres et son câble électronique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
6. Le câble électronique et le fil d'alimentation connectés au réchauffeur en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
7. Le câble d'alimentation connecté à l'arrière du circuit, en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
8. La surface dessous le circuit, 
9. Le pied de soutien de l'appareil (du haut vers le bas),
10. Le plateau de recueil de l'appareil, 
11. Les roues de l'appareil. 

VISUELLEMENT

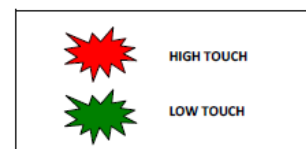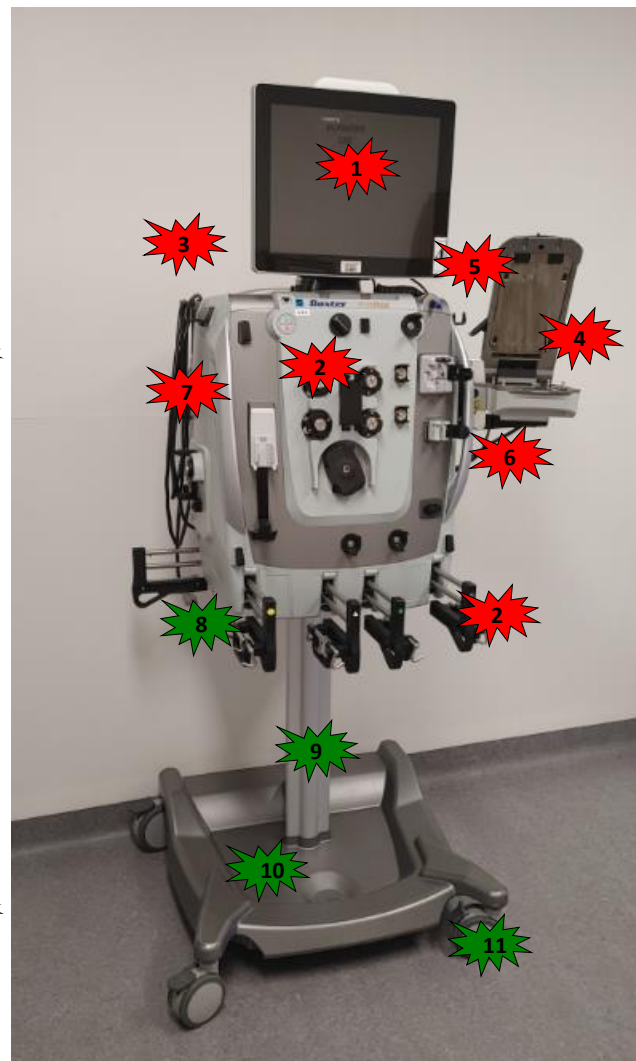



MARCHETTE

Matériel requis



- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez en partant du haut vers le bas 
et en terminant par les roulettes. 


Si la marchette est dans une chambre d'isolement la désinfection quotidienne sera faite par Hygiène Salubrité.

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez en partant du haut vers le bas 
et en terminant par les roulettes. 

Identification par code de couleur pour certifier la désinfection.

VISUELLEMENT

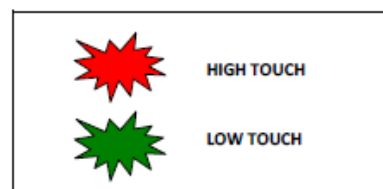

MONITEUR CARDIAQUE DE TRANSPORT






Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**





SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR


Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. L'écran et toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle, 
3. Le brassard et son câble électronique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
4. Le saturomètre et son câble électronique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
5. Les câbles pour électrodes en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure). 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. L'écran et toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle, 
3. Le brassard et son câble électronique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
4. Le saturomètre et son câble électronique en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 

Les câbles pour électrodes en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure). 

VISUELLEMENT



Instrument entièrement high touch







MONITEUR DE DÉBIT CARDIAQUE *HemoSphere*

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
 - ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**









SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle, 
2. La poignée de transport, 
3. Chacun des câbles électroniques de l'appareil, 
4. Les fiches informatives plastifiées, s'il y a lieu. 


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle, 
2. La poignée de transport, 
3. Chacun des câbles électroniques de l'appareil, 
4. Les fiches informatives plastifiées s'il y a lieu, 
5. La tige au complet (du haut vers le bas), 
6. Le câble d'alimentation, 
7. Le pied de l'appareil, 
8. Les roues de l'appareil. 

CHANGEZ DE LINGE

VISUELLEMENT

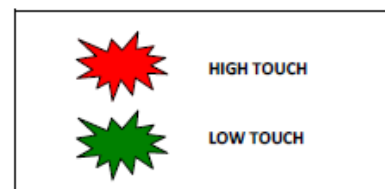

MONITEUR – DÉFIBRILLATEUR CARDIQUE *Lifepak*








Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS/UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :









1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle, 
3. Les palettes de défibrillation et leur câble en partant de la base vers l'extrémité, 
4. Les câbles à électrodes pour monitorer le rythme cardiaque en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 
5. Le câble pour électrode multi-fonctions/ défibrillation en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
6. Toutes les surfaces du boîtier test, 
7. Les pochettes de rangement latérales. 


VISUELLEMENT



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle 
3. Les palettes de défibrillation et leur câble en partant de la base vers l'extrémité, 
4. Les câbles à électrodes pour monitorer le rythme cardiaque en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 
5. Le câble pour électrode multi-fonctions/ défibrillation en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
6. Toutes les surfaces du boîtier test, 
7. Les pochettes de rangement latérales, 
8. Le câble d'alimentation. 

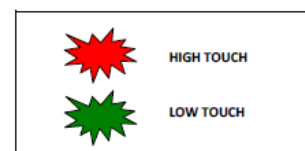




MONITEUR DE LA FONCTION CÉRÉBRALE *INVOS* ET *BIS* de *MedTronic*

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
 - ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**









SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Toutes les surfaces des deux écrans, 
2. La poignée de transport, 
3. Le boîtier Medtronic ainsi que ses câbles électroniques connectés au patient en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE/ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces des deux écrans, 
2. La poignée de transport, 
3. Le boîtier Medtronic ainsi que ses câbles électroniques connectés au patient en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 
4. Chacun des câbles électroniques de l'appareil qui ne sont pas connectés au patient (en partant de la base vers l'extrémité, enroulez-le au fur et à mesure), 
5. Le panier (et son contenu si applicable),
6. La tige au complet (du haut vers le bas), 
7. Le cordon d'alimentation, 
8. Le pied de l'appareil, 
9. Les roues de l'appareil. 

VISUELLEMENT

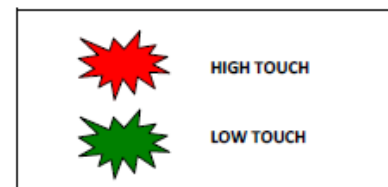







MONITEUR DE SIGNES VITAUX SUR BASE MOBILE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
 - ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**












SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le boîtier électronique de contrôle, 
2. La poignée de transport, 
3. Le brassard, 
4. Le saturomètre, 
5. Les câbles pour électrodes, 
6. Chacun des fils en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure). 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE/ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le boîtier électronique de contrôle, 
2. La poignée de transport, 
3. Le brassard, 
4. Le saturomètre, 
5. Les câbles pour électrodes, 
6. Chacun des fils en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure), 
7. Le panier à brassard et crochets, 
8. La tige au complet (du haut vers le bas), 
9. Le cordon d'alimentation électrique, 
10. Le pied de l'appareil, 
11. Les roues de l'appareil. 

VISUELLEMENT



HIGH TOUCH



LOW TOUCH




OPHTALMOSCOPE ET OTOSCOPE MOBILE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant









SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Toutes les surfaces du boîtier d'interface, 
2. L'otoscope et son câble, en partant de la base vers l'extrémité, 
3. L'ophtalmoscope et son câble, en partant de la base vers l'extrémité, 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces du boîtier d'interface, 
2. L'otoscope et son câble, en partant de la base vers l'extrémité, 
3. L'ophtalmoscope et son câble, en partant de la base vers l'extrémité, 
4. La tige au complet (du haut vers le bas), 
5. Le module d'alimentation électronique et le cordon d'alimentation en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
6. Le panier, 
7. Le pied de l'appareil, 
8. Les roues de l'appareil. 

VISUELLEMENT

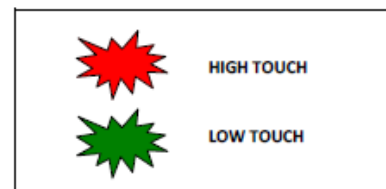



PANIER

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les côtés du panier visible, 
2. La poignée de transport (si applicable), 





VISUELLEMENT



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Videz complètement les paniers.

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les côtés du panier visible, 
2. La poignée de transport (si applicable), 
3. Le fond et les côtés intérieurs, 
4. Le dessous du panier, 



HIGH TOUCH



LOW TOUCH

PÈSE-PERSONNE À RUBAN



Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Montez la tige à mesurer au maximum possible de son extension.






Désinfectez dans cet ordre :

1. La tête verticale de l'appareil, 
2. L'échelle graduée de poids. 



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Montez la tige à mesure au maximum possible de son extension.

Désinfectez dans cet ordre :

1. La tête verticale de l'appareil, 
2. L'échelle graduée de poids. 
3. La tige (de haut en bas), 
4. Les côtés du repose-pieds, 
5. Le dessus du repose-pieds. 

VISUELLEMENT

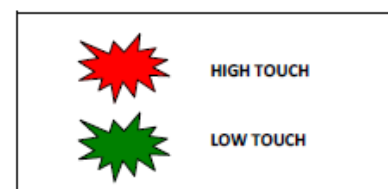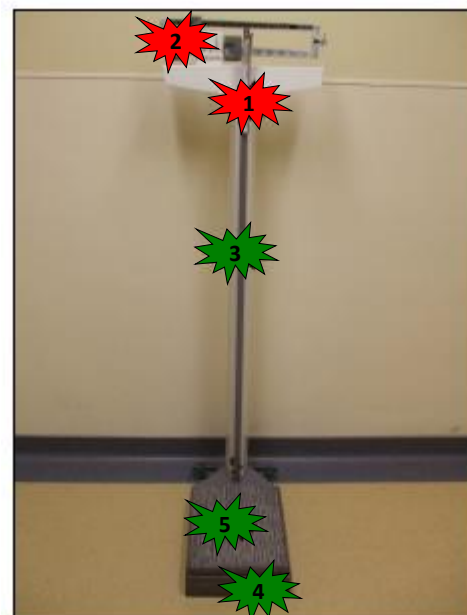



PÈSE-PERSONNE PORTATIF

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfecter dans cet ordre :




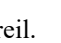
1. Le cadran de lecture, 
2. Le plateau du dessus. 


VISUELLEMENT



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfecter dans cet ordre :

1. Le cadran de lecture, 
2. Le plateau du dessus 
3. Les côtés l'appareil, 
4. Le dessous de l'appareil. 

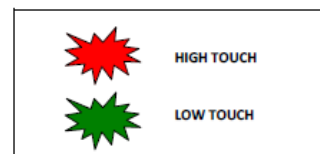


PINCE TRUCLIP À SUPPORTS POUR CAPTEURS

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez toutes les surfaces de la pince. 

VISUELLEMENT









SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE MENSUELLE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez toutes les surfaces de la pince. 

Instrument entièrement high touch



PLANCHE DE TRANSFERT

<p>Matériel requis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Retirez la planche des crochets.</p> <p>Désinfectez les deux surfaces de la planche. </p> <p>Remettez la planche sur le crochet.</p>	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE MENSUELLE / ÉQUIPE DE SOINS	
<p>Retirez la planche des crochets.</p> <p>Désinfectez les deux surfaces de la planche. </p> <p>Remettez la planche sur le crochet.</p>	 <div data-bbox="1149 1453 1531 1638" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  HIGH TOUCH  LOW TOUCH </div>





POMPE ACP

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant






SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de la pompe ACP, 
2. Le fil connecteur et la manette avec le bouton-poussoir, 
3. Toutes les surfaces du boîtier transparent (intérieures puis extérieures) incluant le levier de fixation, 
4. La poignée de serrage. 


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de la pompe ACP,
2. Le fil connecteur et la manette avec le bouton-poussoir, 
3. Toutes les surfaces du boîtier transparent (intérieurs puis extérieurs) incluant le levier de fixation, 
4. La poignée de serrage, 
5. Le cordon d'alimentation, 
6. La tige métallique. 



VISUELLEMENT

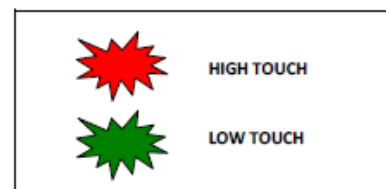


POMPE À GAVAGE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant






SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfecter dans cet ordre :



1. Le moniteur 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfecter dans cet ordre :

1. Le moniteur 
2. La tige (de haut en bas) 
3. Le cordon d'alimentation 
4. La base 
5. Les roues 

VISUELLEMENT

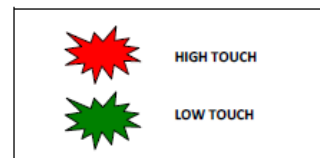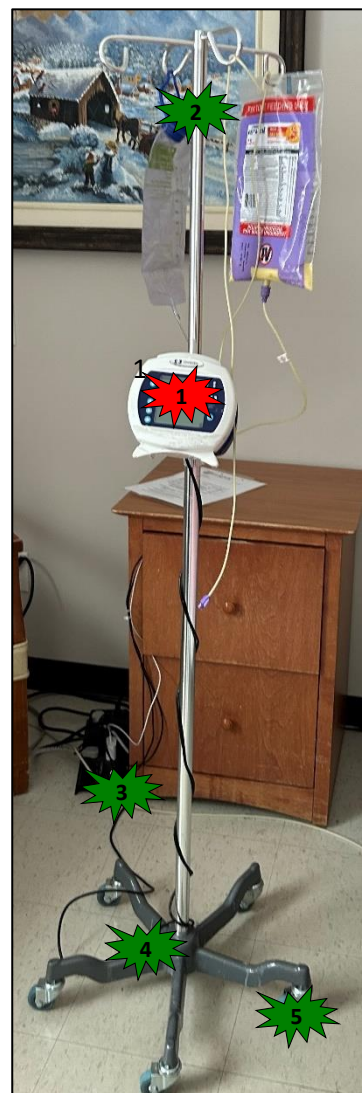

POMPES À PERFUSION ET POUSES-SERINGUES *B.Braun* dans le Space Station (station de chargement)





Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR


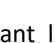
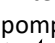
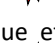


Retirer la pompe du support métallique ou de la station de chargement


Désinfectez dans cet ordre :

1. Dépendamment du support sur lequel la pompe est installée; toutes les surfaces de la station de chargement ou le support métallique et son mécanisme, 
2. Toutes les surfaces (extérieurs et intérieurs en ouvrant la porte avant) du pousse-seringue ou de la pompe à perfusion, 
3. La tige métallique (de haut en bas), 
4. Le module d'alimentation électrique et chacun de ses câbles en partant de la base vers l'extrémité. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE/ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Dépendamment du support sur lequel la pompe est installée; toutes les surfaces de la station de chargement ou le support métallique et son mécanisme, 
2. Toutes les surfaces (extérieurs et intérieurs en ouvrant la porte avant) du pousse-seringue ou de la pompe à perfusion, 
3. La tige métallique (de haut en bas), 
4. Le module d'alimentation électrique et chacun de ses câbles en partant de la base vers l'extrémité, 
5. Le pied de la tige métallique, 
6. Les roues de la tige métallique. 

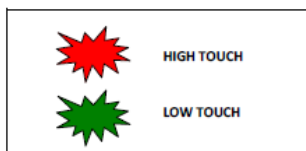

VISUELLEMENT





QUADRIPODE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR




Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée, 
2. La tige. 


Si **dédié dans une chambre**, la désinfection quotidienne est faite par Hygiène Salubrité.

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée, 
2. La tige, 
3. Le pied. 

VISUELLEMENT

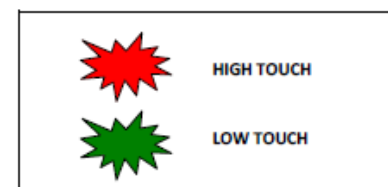

REPOSE-PIEDS

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :




1. Le dessus du plateau et ses côtés, 
2. Les 4 pieds. 


VISUELLEMENT



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le dessus du plateau et ses côtés, 
2. Les 4 pieds, 
3. Le dessous plateau. 

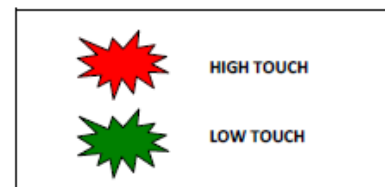

SATUROMÈTRE OU MONITEUR SPO₂

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le boîtier électronique, *
2. Le fil du saturomètre, *
3. La pince digitale du saturomètre. *

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le boîtier électronique, *
2. Le fil du saturomètre, *
3. La pince digitale du saturomètre. *








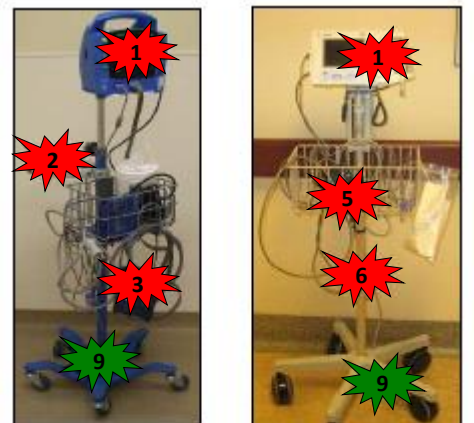
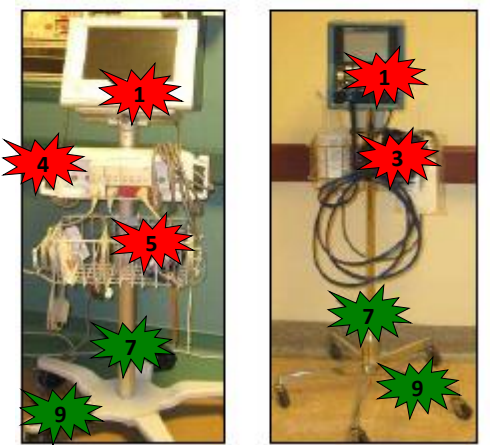












VISUELLEMENT



Instrument entièrement high touch



SPHYGMOMANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE MOBILE

<p>Matériel requis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Nettoyant sans ammoniac OU ✓ Linge humide ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Nettoyez, s'il y a lieu, l'écran tactile avec un linge légèrement humide ou un nettoyant sans ammoniac. </p> <p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le boîtier électronique de contrôle,  2. La poignée de transport,  3. Le brassard,  4. Le saturomètre,  5. Le panier à brassard et crochet,  6. Chacun des fils en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure).  	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS	 <div data-bbox="1079 1459 1437 1648" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  HIGH TOUCH  LOW TOUCH </div>
<p>Nettoyez, s'il y a lieu, l'écran tactile avec un linge légèrement humide ou un nettoyant sans ammoniac.</p> <p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le boîtier électronique de contrôle,  2. La poignée de transport,  3. Le brassard à pression,  4. Le saturomètre,  5. Le panier à brassard et crochet,  6. Chacun des fils en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-les au fur et à mesure),  <p>CHANGEZ DE LINGE</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. La tige au complet,  8. Le module d'alimentation électrique et le cordon d'alimentation,  9. Le pied de l'appareil,  10. Les roues de l'appareil.  	




SPHYGMOMANOMÈTRE MANUEL MOBILE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :




1. Le cadran de lecture, 
2. Le panier, 
3. Le brassard à pression et sa pompe. 

Si l'appareil est dans une chambre d'isolement la désinfection se fera par Hygiène Salubrité.




SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Dérroulez le fil du brassard et déposez-le au sol.

Désinfectez dans cet ordre :


1. Le cadran de lecture, 
2. Le panier, 
3. Le brassard à pression et sa pompe, 

CHANGEZ DE LINGE.

4. La tige au complet (de haut vers le bas), 
5. Le pied de l'appareil, 
6. Les roues de l'appareil. 

Enroulez le fil du brassard et déposez-le dans le panier.

VISUELLEMENT

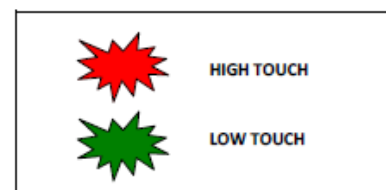





STATION AVEC ORDINATEUR PORTABLE

Matériel requis


- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant
OU
 - ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :





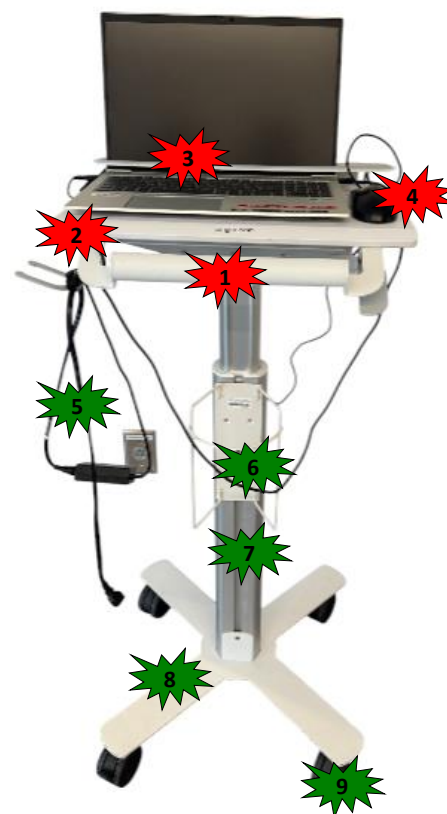




1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces du plateau (incluant ses supports), 
3. Toutes les surfaces de l'ordinateur portable, 
4. La souris d'ordinateur et son câble. 

VISUELLEMENT



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces du plateau (incluant ses supports), 
3. Toutes les surfaces de l'ordinateur portable, 
4. La souris d'ordinateur et son câble, 
5. Le fil de chargement de l'ordinateur portable en partant de la base vers l'extrémité (enroulez-le au fur et à mesure), 
6. Le support fixé à la tige, 
7. La tige au complet (du haut vers le bas), 
8. Le pied de l'appareil, 
9. Les roues de l'appareil, 




STÉTHOSCOPE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les oreillettes, 
2. L'acoustique, 
3. Le corps de l'instrument (tiges de métal et de caoutchouc). 

VISUELLEMENT






Instrument entièrement high touch



SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les oreillettes, 
2. L'acoustique, 
3. Le corps de l'instrument (tiges de métal et de caoutchouc). 

SUPPORT À DRAIN POUR TIGE À SOLUTÉ

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Le clameau de fixation, ✖
2. La plaque de support. ✖

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le clameau de fixation, ✖
2. La plaque de support. ✖

VISUELLEMENT

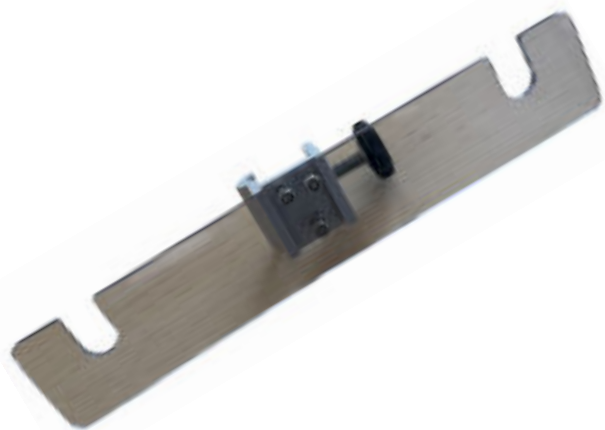

Instrument entièrement high touch



SUPPORT À POCHE DE LINGERIE


















<p>Matériel requis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Retirez la poche de linge et la fermer adéquatement.</p> <p>Retirez le sac de déchets et en disposer adéquatement.</p> <p>Nettoyez d'abord toutes les souillures visibles.</p> <p>CHANGEZ DE LINGE ET DE GANTS</p> <p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'extérieur du couvercle,  2. La poignée (si applicable),  3. L'intérieur du couvercle (si applicable),  4. La penture du couvercle (si applicable),  5. Le contour de caoutchouc (si applicable).  	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS	
<p>Retirez la poche de linge et la fermer adéquatement.</p> <p>Retirez le sac de déchets et en disposer adéquatement.</p> <p>Nettoyez d'abord toutes les souillures visibles.</p> <p>CHANGEZ DE LINGE ET DE GANTS</p> <p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'extérieur du couvercle (si applicable),  2. La poignée (si applicable),  3. L'intérieur du couvercle (si applicable),  4. La penture du couvercle (si applicable),  5. Le contour de caoutchouc (si applicable).  <p>CHANGEZ DE LINGE</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Le support au complet (de haut en bas),  7. La base pliante (si applicable),  8. Les roues.  	 <div data-bbox="1133 1444 1507 1619" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  HIGH TOUCH  LOW TOUCH </div>

TABLE D'EXAMEN

Matériel requis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
------------------------	--














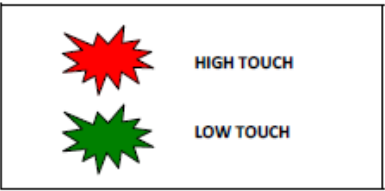
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le matelas,  2. L'appui pieds,  3. La poignée tiroirs sur les façades latérales et avant,  4. La poignée latérale,  5. Porte-rouleau sous l'appuie-tête.  	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ	
<p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le matelas,  2. L'appui pieds,  3. Les tiroirs,  4. La poignée latérale,  5. Porte-rouleau sous l'appuie-tête.  6. Tous les côtés de table,  7. La marche,  	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">  </div>

TABLE DE TRANSPORT



Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE UTILISATION / UTILISATEUR

Videz la table de son contenu.

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les poignées de transport, 
2. Le dessus des tablettes qui ont été utilisées. 






VISUELLEMENT




SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Videz la table de son contenu.

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les poignées de transport, 
2. Le dessus des tablettes (de haut en bas), 
3. Le dessous des tablettes, 
4. Les tiges verticales, 
5. Les roues. 

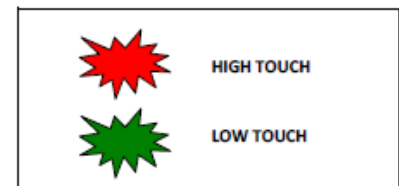


TABLETTE ÉLECTRONIQUE DANS LE COFFRE ERGOTRON

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
 - ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- *TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**





SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

1. Désinfectez toutes les surfaces de la tablette électronique. 


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Débranchez et retirez toutes les tablettes électroniques du coffre Ergotron.

Désinfectez dans cet ordre :

1. Le devant du coffre, 
2. Les côtés extérieurs du coffre, 
3. Le dessus du coffre, 
4. Toutes les surfaces intérieures du coffre, 


Désinfecter les tablettes électroniques dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de chaque tablette 

Brancher toutes les tablettes électroniques à l'intérieur du coffre à la fin de la séquence.

À noter que l'extérieur du coffre a un *high touch* quotidien assuré par l'équipe d'hygiène et salubrité.

VISUELLEMENT

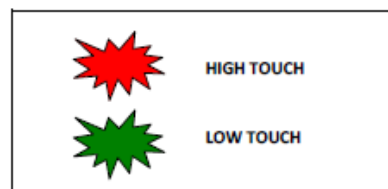



TÉLÉMÉTRIE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant




SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Tous les côtés du boîtier électronique, 
2. Tous les fils de télémétrie en partant de la base vers l'extrémité. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :





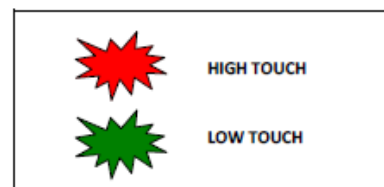






1. Tous les côtés du boîtier électronique, 
2. Tous les fils de télémétrie en partant de la base vers l'extrémité, 
3. L'extérieur du boîtier mural à télémétrie. 

VISUELLEMENT



TÉLÉVISEUR-MOBILE

Matériel requis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gants à usage unique ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyeur-désinfectant OU ✓ Lingette de nettoyeur-désinfectant <p>NETTOYER, S'IL Y A LIEU, L'ÉCRAN TACTILE AVEC UN LINGE LÉGÈREMENT HUMIDE OU AVEC UN NETTOYANT SANS AMMONIAQUE.</p>
------------------------	---

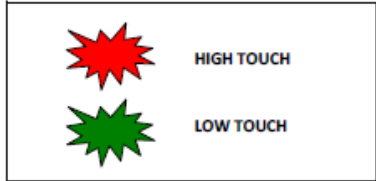SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR	VISUELLEMENT
<p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le téléviseur/l'écran de contrôle,  2. La poignée de transport.  	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS	
<p>Désinfectez dans cet ordre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le téléviseur/l'écran de contrôle,  2. La poignée de transport.  3. La tige au complet (du haut vers le bas),  4. Le module d'alimentation électrique et le cordon d'alimentation (enroulez-le au fur et à mesure),  5. Le panier et crochets,  6. Le pied de l'appareil,  7. Les roues de l'appareil.  	





THERMOMÈTRE ET BOÎTIER MURAL

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Coton-tige OU brosse + solution de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez le thermomètre dans cet ordre :





1. L'extérieur du boîtier mural, 
2. Le boîtier électronique (tous les côtés), 
3. Les fils, 
4. Les sondes. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Enlevez le thermomètre du boîtier.

Imbibez un coton-tige (ou une brosse) de solution nettoyant-désinfectant et nettoyez le fond du boîtier. 

Désinfectez le thermomètre dans cet ordre :

1. L'extérieur du boîtier mural, 
2. Le boîtier électronique (tous les côtés), 
3. Les fils, 
4. Les sondes. 

VISUELLEMENT


Boîtier mural à thermomètre



Thermomètre



Instrument entièrement
High touch

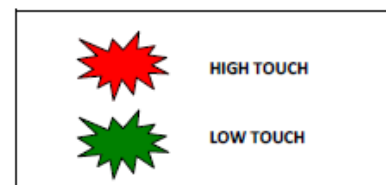




TIGE À SOLUTÉ

Matériel requis


- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Coton-tige
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les crochets en haut de la tige, 
2. La pompe à soluté (si présente sur tige), 
3. Les poignées de transport. 







POMPE À SOLUTÉ, À NARCOTIQUE OU À HYPERALIMENTATION

Si seule la pompe est retirée, désinfectez chacune des surfaces à l'aide d'une solution ou lingette de nettoyant-désinfectant. 



Vérifiez l'intérieur du mécanisme de distribution et nettoyez-le au moyen d'un coton-tige imbibé de nettoyant désinfectant s'il est souillé. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les crochets en haut de la tige, 
2. La pompe à soluté (si présente sur tige), 
3. Les poignées de transport, 
4. La tige au complet (du haut vers le bas), 
5. Les pattes, 
6. Les roues. 

VISUELLEMENT

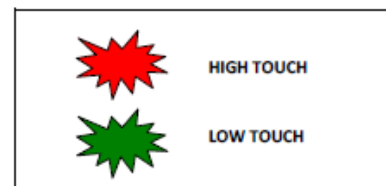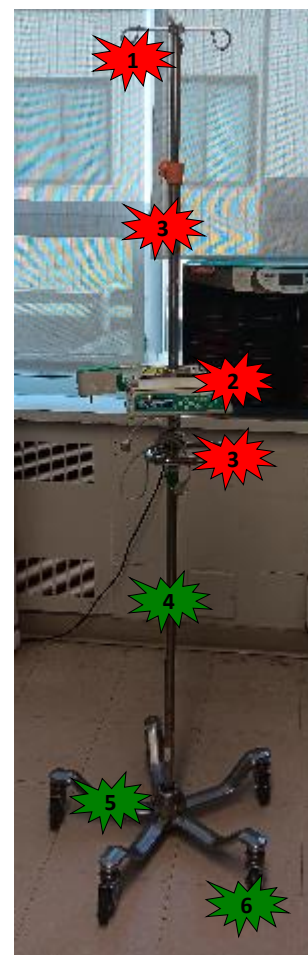

TIGE À SOLUTÉ SUSPENDUE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant




SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE QUOTIDIENNE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les crochets en bas de la tige, 
2. La poignée. 


SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / HYGIÈNE SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les crochets en bas de la tige, 
2. La poignée, 
3. La tige (de haut en bas). 

Une fois par mois, désinfecter le rail.

VISUELLEMENT

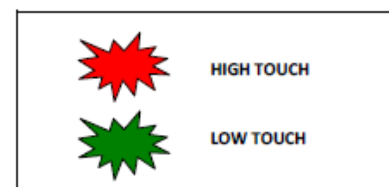




TOUR À BRONCHOSCOPIE

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ ***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**








SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle, 
2. Chaque tablette (du haut vers le bas), 
3. Toutes les surfaces des boîtiers électroniques de contrôle disposés sur les tablettes. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. Toutes les surfaces de l'écran de contrôle, 
2. Chaque tablette (du haut vers le bas), 
3. Toutes les surfaces des boîtiers électroniques de contrôle disposés sur les tablettes, 
4. La tige de support pour l'écran, 
5. Les surfaces latérales et arrière de l'appareil (du haut vers le bas), 
6. Le plateau au-dessus des roues, 
7. Les roues et les freins. 

VISUELLEMENT

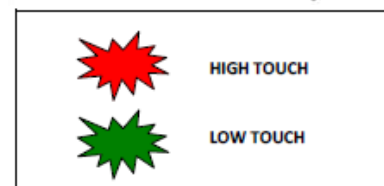




UNITÉ DE RÉCHAUFFEMENT PORTATIVE « WARMTOUCH »

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ ***TRÈS IMPORTANT : BIEN ESSORER VOTRE LINGE/LINGETTE AVANT LA DÉSINFECTION**







SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle, 
3. Le tuyau d'air. 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE HEBDOMADAIRE / ÉQUIPE DE SOINS

Désinfectez dans cet ordre :

1. La poignée de transport, 
2. Toutes les surfaces du boîtier électronique de contrôle, 
3. Le tuyau d'air, 
4. Le panier sous l'appareil (chaque tige servant à sa structure), 
5. Le câble d'alimentation de l'appareil, 
6. Les roues de l'appareil. 

VISUELLEMENT

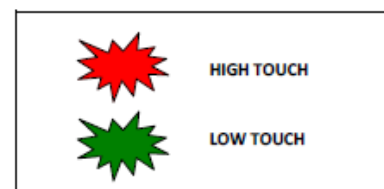





VERTICALISATEUR

Matériel requis

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Linge en microfibre imbibé d'une solution de nettoyant-désinfectant
OU
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant








SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS / UTILISATEUR

Désinfectez dans cet ordre :


1. Les poignées de contrôle et leurs tiges au complet (du haut vers le bas), 
2. La barre d'appui patient, 
3. Toutes les surfaces du support pour les genoux, 
4. Toutes les surfaces du siège scindé en deux parties pivotantes, 

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE MENSUELLE / HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Désinfectez dans cet ordre :

1. Les poignées de contrôle et leurs tiges au complet (du haut vers le bas), 
2. La barre d'appui patient, 
3. Toutes les surfaces du support pour les genoux, 
4. Toutes les surfaces du siège scindé en deux parties pivotantes, 
5. Les pieds de l'appareil et sa base, 
6. Les pédales pour contrôler l'écartement des pieds de l'appareil, 
7. Les roues de l'appareil. 

VISUELLEMENT

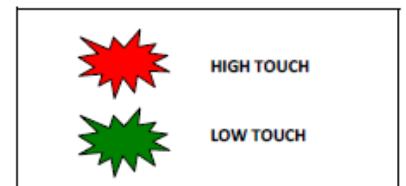

RÉFÉRENCES

Lignes directrices en hygiène et salubrité : Analyse et concertation, *Ministère de la santé et des services sociaux du Québec ; 2006*

Désinfectants et désinfection en hygiène et salubrité principes fondamentaux. *Ministère de la santé et des services sociaux du Québec ; 2009.*

Pratiques exemplaires en matière de nettoyage de l'environnement en vue de la prévention et de la lutte contre les infections dans tous les établissements de soins de santé, *Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI), Ontario ; 2007.*

Les zones grises : processus d'attribution des responsabilités, *Ministère de la santé et des services sociaux du Québec ; 2008.*

Procédures de nettoyage et de désinfection des zones grises, *Association en hygiène et salubrité en santé.*
Source : Ce document est une adaptation du document «Procédure de nettoyage et de désinfection des zones grises du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec».

POLC-DGA-107 Salubrité et entretien de l'environnement, du matériel et de l'équipement dans les services où des soins et services sont dispensés, *CSSS Pierre-De Saurel, entrée en vigueur le 15 juin 2011.*

DEVIS DE SERVICE EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ, *La direction des ressources financières, immobilières et informationnelles du CSSS Pierre-De Saurel, janvier 2011*

5. DISPOSITION FINALE

Responsable de l'application de la politique

Le président-directeur général de l'établissement, ou la personne qu'il désigne est responsable de l'application de la présente politique.

Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le comité de la haute direction.

Révision

La présente politique doit faire l'objet d'une révision tous les quatre ans ou plus rapidement, selon les besoins.

FEUILLE DE CONTRÔLE DÉSINFECTION DES PETITS ÉQUIPEMENTS

(La liste des items varie selon le milieu et est à établir par la gestionnaire)

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

FEUILLE DE CONTRÔLE équipements/chariots/autres :

Période financière : _____

Unité : _____

Nom du responsable : _____

Nom de l'item	Quantité		Initial	Date (jj/mm)

Signature du responsable : _____

ANNEXE 2

FEUILLE DE CONTRÔLE - DÉSINFECTION HEBDOMADAIRE DES PETITS ÉQUIPEMENTS (ÉQUIPE DE SOINS)

Semaine du : _____

Code d'identification : _____

**À désinfecter après
chaque utilisation :**

- Chaise d'aisance
- Tensiomètres dans les chambres
- Glucomètre
- Tige à soluté
- Doppler
- Otoscope
- Etc.

DIMANCHE

NUIT	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JOUR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SOIR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

LUNDI

NUIT	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JOUR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SOIR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

ANNEXE 2 (suite)

MARDI

NUIT	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

MERCREDI

NUIT	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JEUDI

NUIT	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JOUR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JOUR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JOUR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SOIR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SOIR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SOIR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

VENDREDI

NUIT	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JOUR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SOIR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SAMEDI

NUIT	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

JOUR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

SOIR	Équipement	Cocher si fait

Signature : _____

Date : _____

RÉALISATION DE LA DÉSINFECTION HEBDOMADAIRE DES PETITS ÉQUIPEMENTS DE SOINS

Unité : _____

Période (1 à 12) : _____

Semaine 1 :	<input type="checkbox"/> Désinfection complète <input type="checkbox"/> Incomplète Commentaire : _____
Semaine 2 :	<input type="checkbox"/> Désinfection complète <input type="checkbox"/> Incomplète Commentaire : _____
Semaine 3 :	<input type="checkbox"/> Désinfection complète <input type="checkbox"/> Incomplète Commentaire : _____
Semaine 4 :	<input type="checkbox"/> Désinfection complète <input type="checkbox"/> Incomplète Commentaire : _____
Semaine 5 :	<input type="checkbox"/> Désinfection complète <input type="checkbox"/> Incomplète Commentaire : _____

J'atteste avoir pris connaissance du travail exécuté pour la désinfection hebdomadaire des petits équipements.

 Signature du chef de l'unité

 Date

Conserver cette feuille afin d'assurer le suivi et la vigie par la personne concernée.